



medi

Catálogo
de productos medi
Flebología



medi. I feel better.


COMPRESIÓN para enfermedad venosa crónica y EAP / Diabetes ?

Lana merino en todo el pie

Sólida estructura acanalada

Sí, ¡claro!*

Acollchado suave exclusivo desde encima de los tobillos hasta el final de la puntera

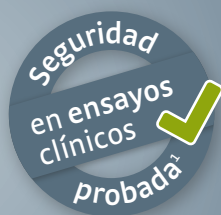

mediven® angio

Seguridad hasta los dedos del pie

Costura extralarga y plana

mediven® angio

Seguridad de tratamiento—
hasta los dedos del pie.

* La seguridad del producto fué probada. El uso de la media de compresión médica mediven(R) angio en pacientes con enfermedades venosas crónicas y leve concomitante enfermedad arterial periférica (EAP) a moderada y/o diabetes mellitus es segura.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

Seguridad y tratamiento adecuado para la indicación



Enfermedad venosa crónica (CEAP C0s – C5)

aprox. 98 % de las personas mayores de 60 años²

Diagnóstico clínico

- Reflujo venoso
- Hipertensión venosa

Criterios individuales de los pacientes

- Gravedad de la enfermedad venosa
- Edema
- Peso/IMC



Terapia de compresión con **mediven® Tejido circular** (p. ej. mediven plus) – **Tratamiento individualizado del paciente**

Enfermedad venosa crónica (CEAP C0s – C5) y EAP de leve a moderada

aprox. 21 % de las personas mayores de 65 años³

Otros diagnósticos clínicos^{3,4}

- Fontaine; estadio I – II
- Índice tobillo-brazo (ITB) <0,9 y >0,5
- Presión arterial del tobillo >60 mmHg
- Sin pulsaciones palpables en el pie

Criterios individuales de los pacientes

- Atrofia general de los tejidos
- Trastorno trófico cutáneo
- Hiperqueratosis de tipo papel de lija




Terapia de compresión con **mediven® angio** – **Exclusiva y segura**

✓ Producto exclusivo

- Lana merino en todo el pie
- Sólida estructura acanalada
- Costura extralarga y plana en la puntera

✓ Ensayo clínico

- Microcirculación estable
- Ausencia de lesiones en la piel
- Ausencia de abrasión
- Ausencia de puntos de presión
- Alta comodidad de uso

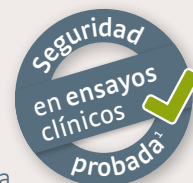

Confirmado para las clases de compresión 1 y 2



Enfermedad venosa crónica (CEAP C0s – C5) y diabetes mellitus tipo 2 / PNP diabética

aprox. 20,5 % de las personas mayores de 60 años⁵

Otros diagnósticos clínicos


- Parestesia
- Hipoestesia
- Analgesia

Criterios individuales de los pacientes

- Edema trófico
- Hiperqueratosis en áreas expuestas a presión
- Piel seca



Contraindicación de la terapia de compresión médica⁴

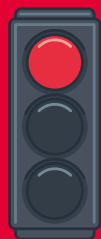

Enfermedad venosa crónica y EAP severo

Enfermedad venosa crónica y síndrome del pie diabético (DFS)



Ningún tratamiento con medias de compresión médicas

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

² Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1–14.

³ Lawall H et al. S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Disponible en Internet: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/065-003.html> (Último acceso 28/12/2020).

⁴ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Disponible en Internet en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Último acceso 28/12/2020).

⁵ Bericht der nationalen Diabetes-Surveillance 2019. Diabetes in Deutschland. Robert Koch-Institut.



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61 2 9890 8696
F +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
Adamgasse 16 / 7
6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at

medi Belgium NV
Staatsbaan 77 / 0099
3945 Ham
Belgium
T + 32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Canada Inc / médi Canada Inc
104-1375 Lionel-Boulet,
Varenes, Québec,
QC Canada J3X 1P7
T +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153
F +1 888-583-6827
service@medicanada.ca
www.medicana.ca

medi Danmark ApS
Vejleåvej 66
2635 Ishøj
Denmark
T +45-70 25 56 10
F +45-70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medit danmark.dk

medi Bayreuth Espana SL
C / Canigo 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 932 60 04 00
F 34 932 60 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi France
Z. I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1 371-0090
F +36 1 371-0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia s. r. l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T +39 051 6 13 24 84
F +39 051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T +47 52 84 45 00
F 47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z. o. o.
ul. Łabędzka 22
44-121 Gliwice
Poland
T +48 32 230 60 21
F +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7 495 374 04 56
F +7 495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Sweden AB
Box 6034
19206 Sollentuna
Sweden
T +46 8 969798
F +46 8 6266870
info@medi.se
www.medi.se

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 0EL
Great Britain
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Evhena Sverstiuka str, 11.
Kiev 02002
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1703, T1, CES WEST BUND CENTER,
No. 277, Long Lan Road
Xuhui District
200232 Shanghai
People's Republic of China
T +86 21 50582319
F +86 21 50582319

Medi Turk Ortopedi Medikal Ic ve Dis Tic. AS
Mustafa Kemal Mah. 2156 Sokak No: 16 / 4 – 5
06510 Çankaya Ankara
Turkey
T +90 312 435 20 26
F +90 312 434 17 67
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

MAXIS a. s.
medi group company
Slezská 2127 / 13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T +420 571 633 510
F +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com

Tachezy Sanit Srl.
Via Druso 48 / a
39100 Bolzano
Italy
T +39 0471 288 068
F +39 0471 282 773
info@tachezysanit.com
www.tachezysanit.com

medi Japan K. K.
5-1 Nihonbashi Kabutocho Chuoku
103-0026 Tokyo
Japan
T +81 3 6778 2590
F +81 3 5847 7901
info@medi-japan.jp
www.medi-japan.co.jp

Definición de números de artículo en flebología

El último dígito del número de artículo es su talla.

Seleccione puntera abierta o cerrada

(6.º dígito: 0 = puntera abierta, 1 = puntera cerrada) para todas las calidades excepto

mediven plus, mediven for men, mediven active, medi travel men / women.

Seleccione el color (5.º dígito) en lugar de x.

mediven sheer & soft

0 = Natural

5 = Ébano

mediven elegance

C = Cachemir

A = Antracita

K = Rosado*

5 = Negro

1 = Caramelo

M = medi Magenta

Z = Bronce*

7 = Blanco

0 = Beige

3 = Azul marino

* Seleccione puntera abierta o cerrada (6.º dígito: 7= puntera abierta,

8 = puntera cerrada).

mediven for men / mediven active

3 = Azul marino

5 = Negro

6 = Marrón

7 = Blanco (solo mediven active)

A = Antracita

mediven comfort

C = Cachemir

0 = Beige

K = Rosado

3 = Azul marino

1 = Caramelo

A = Antracita

Z = Bronce

5 = Negro

mediven plus

C = Cachemir

3 = Azul marino

K = Rosado

A = Antracita

1 = Caramelo

5 = Negro

Z = Bronce

M = medi Magenta

0 = Beige

7 = Blanco

mediven forte

C = Cachemir

0 = Beige

K = Rosado

3 = Azul marino

1 = Caramelo

Z = Antracita

X = Bronce

5 = Negro

mediven angio

1 = Caramelo

5 = Negro



Lideramos el futuro de la terapia de compresión

Una marca líder.

Una amplia gama de productos.

Con conceptos convincentes.

medi World of Compression: una guía para el futuro gracias a sus más de 70 años de experiencia en el campo de la compresión. Su socio de referencia para satisfacer las demandas más exigentes de calidad, innovación y diseño. Diseñemos juntos el futuro y creemos experiencias de marca positivas, tanto para usted como para sus clientes.

Clientes satisfechos y nuevos potenciales

Múltiples combinaciones posibles para lograr tratamientos exitosos.

Las prendas de compresión mediven están disponibles en muchos colores y variantes. Por eso, medi ofrece la prenda perfecta para distintas indicaciones en flebología. El amplio catálogo de complementos ayuda a los pacientes a disfrutar del uso de sus medias. Únase a medi para beneficiarse de servicios útiles y basados en la colaboración mutua.

medi World of Compression

medi convence gracias a un enfoque holístico para la compresión. Por eso puede confiar en los productos medi. Se elaboran teniendo en cuenta hasta el último detalle conforme a las necesidades de sus clientes y ofrecen el mayor éxito posible del tratamiento.

Para introducirle en el medi World of Compression hemos creado catálogos según las distintas indicaciones. Así podrá encontrar el producto adecuado para todas las indicaciones y situaciones al instante. A continuación encontrará una breve explicación de los diferentes catálogos:



Flebología

Las medias de compresión de tejido circular mediven son la clave del tratamiento conservador en pacientes con trastornos venosos. Descubra más detalles sobre los múltiples estilos y variantes de los productos mediven y circaid para la salud circulatoria.

N.º de artículo: 0097D96



Concepto de terapia para linfología

El concepto de terapia medi para linfología supone un nuevo enfoque en el tratamiento del linfedema. Contempla la fase de descongestión, la fase de transición y la fase de mantenimiento, y proporciona los productos adecuados para cada estadio. Con los productos circaid y mediven de tricotado plano, el tratamiento del linfedema resulta más personalizado que nunca.

N.º de artículo: 0097D94



Concepto de terapia para úlceras en la pierna

El concepto de terapia medi para úlceras en la pierna acompaña al paciente durante todo el tratamiento de las úlceras venosas en la pierna, desde la fase aguda hasta la prevención de la recidiva.

N.º de artículo: 0097D95



Concepto de terapia para úlceras en la pierna

El concepto de terapia medi para úlceras en la pierna acompaña al paciente durante todo el tratamiento de las úlceras venosas en la pierna, desde la fase aguda hasta la prevención de la recidiva.

N.º de artículo: 0097D95

8

Tratamiento personalizado del paciente con mediven®

16

Resumen de mediven®

Clases de compresión, Longitud y características, Tablas de medidas, gama de colores y propiedades del producto.



24

mediven sheer & soft®

Las medias de compresión más transparentes de medi.



28

mediven elegance®

La belleza que se ve.



32

mediven® for men

Elegantes calcetines de compresión con una moderna estética profesional.



36

mediven® comfort

La suavidad que puede sentirse.



40

mediven plus®

La fiabilidad que perdura.



46

mediven active®

Calcetines de compresión muy resistentes para hombres activos.



50

mediven® forte

La protección que puede sentirse.



56

mediven® angio

Seguridad de tratamiento – hasta los dedos del pie.

62

Modelos especiales de tricotado circular Versiones con escudete

Resumen de las características disponibles según el tejido.



80

mediven® ulcer kit

Sistema de medias para el tratamiento de úlceras en la pierna.



86

mediven harmony®

Mangas de tricotado circular en siete tallas.



90

circaid®

Prendas de compresión autoajustables para el tratamiento de enfermedades venosas.



106

medi travel®

Calcetines de viaje sin receta para personas con un sistema venoso sano.



110

Accesorios medi

184

Servicio

Más que un simple fabricante

medi produce artículos médicos para una gran variedad de trastornos y situaciones vitales. Pero no nos consideramos un simple fabricante. Sino que gestionamos internamente elementos como la investigación y el desarrollo, la tecnología, la producción, el marketing y las ventas, centrándonos siempre en los mercados, sus demandas y variables, así como en la propia visión de medi.

medi ofrece productos en cuatro divisiones: flebología, hospital, ortopedia, cuidado de los pies y tratamiento de heridas. Estos productos se utilizan y distribuyen en tiendas de productos médicos, hospitales, clínicas, consultorios médicos y terapeutas. Es decir, son distribuidos por especialistas que saben qué producto necesita cada usuario para mejorar su calidad de vida.

De lo que nos sentimos más orgullosos, y lo que hace que nuestros productos sean tan especiales, es de la absoluta ausencia de efectos secundarios nocivos.

Nuestra gama de productos incluye principalmente medias de compresión médica para personas con insuficiencia venosa, lipoedema y linfedema, soportes y aparatos para el tratamiento conservador y postoperatorio de lesiones y trastornos ortopédicos, medias para la prevención de la trombosis, medias antiembolia para el uso después de cirugía en las venas, prendas de compresión para el uso después de cirugía plástica y cosmética, además de una variedad de productos que respaldan la terapia.

Ayudamos a nuestros socios durante la venta y el suministro de los productos y, para ello, hemos desarrollado conceptos y servicios inteligentes.




Certificados de calidad

Como fabricante de productos médicos, medi tiene un gran compromiso con la calidad. Los certificados de productos y sistemas avalan el cumplimiento de todos los requisitos legales.

Marca CE

Nuestros productos médicos cumplen todos los requisitos de la Directiva Europea 93/42/CEE y de la ley alemana de equipamiento médico. Conforme a estas disposiciones, nuestros productos están sujetos a procedimientos de evaluación de conformidad y se les concede la marca CE. A modo de “pasaporte para productos industriales”, la marca CE garantiza la libre circulación en el Área Económica Europea (AEE).

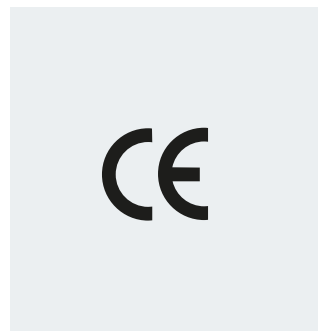

Etiqueta de calidad

Nuestras medias de compresión médicas se revisan regularmente a través del Hohenstein Research Institute según las normas de calidad y pruebas de la RAL-GZ 387. La etiqueta de calidad impresa en el embalaje confirma que nuestros productos cumplen las condiciones de calidad.



Sello de calidad textil

Todas las medias y prendas de compresión, ya sean de tejido plano o circular, las medias para profilaxis de la trombosis y los soportes se examinan y clasifican con regularidad de conformidad con los estándares más estrictos a través de centros de pruebas independientes con objeto de detectar sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud. El certificado Oeko-Tex Standard 100 garantiza una calidad probada para la protección de la salud.



DIN EN ISO 13485

medi cuenta con un sistema de gestión de calidad según EN ISO 13485. Desde 1996 garantizamos a nuestros clientes la calidad premium con un certificado. Desde entonces, medi ha mejorado las oportunidades que ofrece esta norma para el desarrollo continuo de los productos de las unidades de negocio flebología, ortopedia, cuidado de los pies y hospital de cara a organizar procesos y procedimientos más seguros y eficientes. La satisfacción de los clientes es para nosotros un elemento decisivo para medir la calidad.



Dispositivo de pruebas Hohenstein – HOSY

La presión es la característica más importante de cualquier media de compresión médica.



Tratamiento personalizado del paciente con mediven®

medi. I feel better.

Bajo este lema, tratamos de desarrollar productos adecuados para cada indicación. Tejidos apropiados diseñados según las indicaciones y el estilo de vida de cada paciente con un trastorno venoso.





El estudio observacional de mediven®: datos y cifras

El estudio demuestra una elevada aceptación de las medias de compresión médica mediven®^{1,2}

Elevada aceptación

Hasta un **98 %**
de los pacientes

no presentó síntomas mientras
llevaban puestas las medias de
compresión médica

Comodidad de uso

Más del **70 %**
de los pacientes

consideró que las medias de
compresión médica eran cómodas

Mejora de los síntomas

En hasta
un **53,2 %**
de los pacientes

las medias de compresión médica
mejoraron los síntomas subjetivos

Buen cumplimiento

Hasta un **75,6 %**
de los pacientes

usó las medias de compresión médica
a diario

En el **17,7 %**
de los pacientes

los resultados clínicos objetivos mejoraron
de acuerdo con la clase CEAP*

Hasta un **68,4 %**
de los pacientes

usó las medias de compresión médica
desde la mañana hasta la noche

¹ Schwahn-Schreiber et al. Phlebologie 2016;45(1): 15 – 24.

² Schwahn-Schreiber et al. Phlebologie 2016;45(4):207 – 214.

* CEAP: clasificación de trastornos venosos crónicos

La brecha entre la situación del tratamiento médico y los criterios específicos del paciente

Situación del tratamiento médico



Aprox.
3/4
de los pacientes
usaron medias de
compresión médica
de materiales ligeros
sin tener en cuenta
su CEAP y su IMC

Criterios específicos del paciente: peso



Aprox. **2/3**
de los pacientes
padecían sobrepeso
u obesidad

El término «material» comprende distintas características textiles de las medias de compresión médica y se define por la resistencia, la rigidez y la elasticidad del tejido de punto.

El estudio observacional de mediven ha demostrado que raras veces se tienen en cuenta los criterios específicos del paciente a la hora de prescribir las medias de compresión médica.

Aunque dos tercios de los pacientes tenían sobrepeso o eran obesos, el 73,8% de las medias de compresión recetadas estaban fabricadas con materiales ligeros. En aquellas personas de mayor peso se produjeron constricciones frecuentes causadas por el uso de medias de compresión médica de un material ligero.

2 pasos para lograr la media de compresión mediven perfecta y personalizada:

Paso 1: Considerar la indicación/gravedad de la enfermedad








Paso 2: Considerar los criterios específicos del paciente

Paso 1: Resumen de las indicaciones en flebología

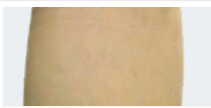La compresión medi ayuda a mejorar

- los síntomas venosos, incluida la reducción del dolor
- la calidad de vida de quienes padecen enfermedades venosas crónicas

y deben considerarse las siguientes indicaciones (nivel más alto de recomendación):¹

Indicación		Producto (CCL)	mediven sheer & soft (15-20 mmHg, 20-30 mmHg)	mediven elegance (1, 2)	mediven for men (1, 2)
Enfermedades venosas crónicas de acuerdo con CEAP					
C0s		Sin señales visibles de enfermedad venosa	•	•	•
C1		Arañas vasculares, telangiectasias, venas varicosas reticulares	•	•	•
C2		Venas varicosas sin señales de una insuficiencia crónica venosa (IVC)	•	•	•
C3		Prevención y tratamiento de edema venoso			•
C4		Prevention and therapy of skin changes C4a Pigmentation, eczema C4b Lipodermatosclerosis, atrophy blanche C4c Corona phlebectatica			
C5		Úlceras venosas (UCV) cicatrizadas, Prevención de la recidiva de UCV			
C6		UCV activa			
Otros					
Tratamiento para úlceras venosas mixtas					
Otras enfermedades venosas crónicas					
Fase inicial después de un tratamiento de las varices					
Insuficiencia venosa funcional debido a la obesidad					
Otros edemas					
Quejas por congestión y edemas en el embarazo, edemas de reperfusión postoperatoria, edema postraumático, posoperatorio y ocupacional, edema inducido por medicamentos, edema por inmovilidad					
Tromboembolia					
• Trombosis venosa superficial					
• Trombosis venosa profunda					
• Trastorno posterior a la trombosis, síndrome posttrombótico					
• Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad					
• Trombosis venosa en el brazo					
Otras indicaciones					
• Dermatitis inflamatoria de las piernas					
• Náuseas, mareos en el embarazo					

Nota:

1. Es importante considerar los diferentes materiales de las medias de compresión médica (MCS): materiales ligeros, medios y fuertes. El término «material» comprende distintas características textiles de las MCS (resistencia, rigidez y elasticidad). El uso de los tres materiales depende de las características del paciente (p. ej., peso corporal, edema, gravedad del trastorno venoso, tejido conjuntivo): Tenga en cuenta: Cuanto mayor sea el peso corporal, mayor el

Consejo de medi: En cuanto a las indicaciones, nos remitimos a las directrices S2k para la terapia de compresión médica de la Sociedad alemana de flebología.¹

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Publicadas online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Último acceso: 13/08/2019)

	mediven comfort (1, 2)	mediven plus (1, 2, 3)	mediven active (1, 2)	mediven forte (2, 3)	mediven harmony (1, 2)	circaid juxtalite (20-30 / 30-40 / 40-50 mmHg)	mediven ulcer kit (2 x 20 mmHg)	circaid juxtacures (20-30/30-40/ 40-50 mm Hg)
	•	•	•	•				
	•	•	•	•				
	•	•	•	•				
	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•		•		
		•		•		•	•	
						•	•	•
						•	•	•
	•	•		•		•		
				•				
	•	•	•	•				
	•	•	•	•				
	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•		•		
	•	•	•	•		•		
					•			
	•	•	•	•				
	•	•		•				

Potencial descongectivo

edema venoso, más grave el trastorno venoso o más blando el tejido conjuntivo, más fuerte debe ser el material de las MCS.

2. MCS con clase de compresión I (CCL I) es una opción que puede tenerse en cuenta para pacientes ancianos o en pacientes con un tratamiento inicial, dado que es bien sabido que el proceso de colocación y retirada de las MCS es más sencillo en las CCL I que en las clases de compresión superiores, con lo que se mejora el cumplimiento.

Paso 2: Considerar los criterios específicos del paciente

Recomendación – mediven® care compass:

- Cuando mayor sea el peso del paciente
 - Cuando mayor sea el edema (edema venoso)
 - Cuando más grave sea la enfermedad
 - Cuando más blando sea el tejido conjuntivo
- Más fuerte debe ser el material de compresión.
- Con que se cumpla solo uno de estos criterios se necesitará un material más fuerte.
- ¡Atención! Para linfedema o lipedema, utilice mediven de tricotado plano.

Ejemplo práctico: Obesidad, enfermedad leve y edema leve → material fuerte

Consejo de medi:





Presta atención a las enfermedades asociadas.
 Clientes con enfermedad venosa crónica y simultánea

→ enfermedad arterial periférica (EAP) de leve a moderada y/o

→ diabetes mellitus / polineuropatía diabética (PNP) tienen requisitos especiales para una media de compresión médica.

mediven angio se desarrolló especialmente para este propósito, y su seguridad se demostró en un ensayo clínico.

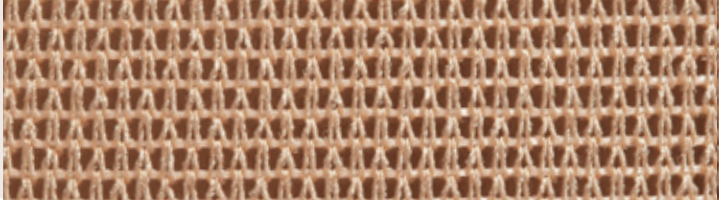Pregunte activamente a sus clientes sobre estas enfermedades asociadas.

<p>Material</p> <p>Criterios</p>	<p>Ligero (p. ej., mediven elegance)</p> 
<p>1. Peso</p>	
<p>2. Edema (edema venoso)</p>	<p>—</p>
<p>3. Gravedad de la enfermedad</p>	
<p>Medias de compresión mediven® recomendadas:</p>	<p>mediven sheer & soft</p> <p>mediven elegance</p> <p>mediven for men</p> 

Consejo medi




Para C5 y C6, por favor considera el Concepto de terapia medi para úlceras en las piernas. medi.biz/wound



Por favor mira el Concepto de terapia limfologica para el tratamiento de lipedema y linfedema n.º de artículo: 0097D97

Medio
(p. ej., mediven plus)

Fuerte
(p. ej., mediven fuerte)

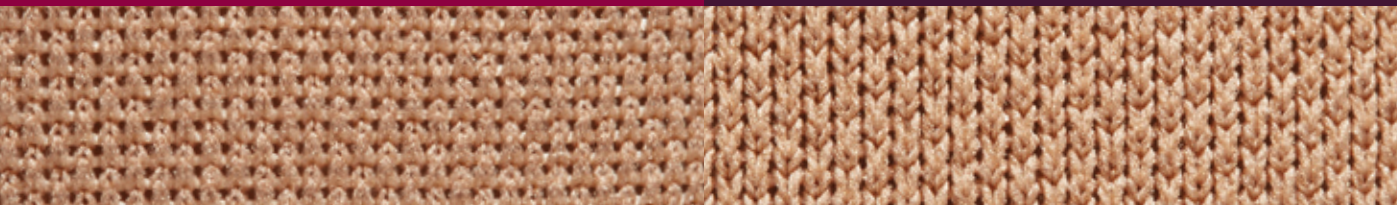

mediven comfort

mediven plus

mediven active

mediven fuerte




medias de compresión médica mediven®

Las medias de compresión de tricotado circular mediven son la clave del tratamiento conservador en pacientes con trastornos venosos. Constituyen la terapia básica para pacientes con trastornos venosos.

En combinación con estilo de vida saludable y actividad física, las medias de compresión médica mejoran los síntomas y signos venosos. Sus clientes se percatarán muy pronto de que las medias de compresión mediven son buenas para ellos y su bienestar, y de que mejoran su calidad de vida.



Características del producto mediven®

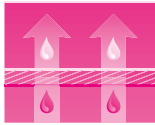

Clima Comfort

Clima Comfort*

- Evacua rápidamente la humedad de la superficie de la piel
- Garantiza un elevado nivel de transpirabilidad



Clima Fresh

Función Clima Fresh integrada

- Efecto inhibidor del olor



Soft Elastic

Soft Elastic

- Libertad notablemente mayor con puntera cerrada
- Aumenta la comodidad de uso
- Menos presión sobre los dedos del pie



Perfect Fit

Perfect Fit

- Un ajuste muy preciso
- Gradiente de presión con eficacia médica
- Condiciones de tratamiento óptimas en las versiones estándar y a medida



Variety

Amplia gama de variantes y modelos especiales

Colores para mejorar la calidad de vida

- Amplia selección de colores disponibles y las últimas tendencias en color disponibles.

Fibras de última tecnología para lograr una elasticidad natural

- Gran elasticidad con estiramiento doble
- Comodidad óptima para el usuario
- Facilidad para colocar y retirar
- Ajuste perfecto y sin arrugas
- Transparencia muy atractiva y sensación refinada



cf. Ben Ammar, F. (DermScan): Evaluación clínica de la tolerancia cutánea de un dispositivo médico - test realizado bajo control dermatológico, Tunis 2012/2013.



Todas las medias de compresión mediven están fabricadas sin látex.



* Clima Comfort

* Probado científicamente por el instituto francés IFTH. Los resultados del ensayo demuestran que la tecnología Clima Comfort de medi garantiza el control térmico entre la piel y la media. Con 11/12 puntos, medi logró una excepcional puntuación global.

Características del producto mediven® ulcer kit



Softness

Suavidad**


- Material suave que ofrece comodidad de uso
- Se desliza suave y cómodamente sobre la piel



Easy donning

Facilidad de colocación***

- Media interior y exterior con 20 mmHg en ambos casos para facilitar la colocación y la retirada
- Media interior suave que facilita la colocación de la media externa

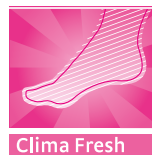

Clima Fresh

Función Clima Fresh integrada

- Efecto inhibidor del olor

** Estas características se aplican únicamente a la media interior mediven ulcer

*** Estas características se aplican únicamente a mediven ulcer kit

Tablas de medidas mediven®

Tabla de medidas

mediven elegance®

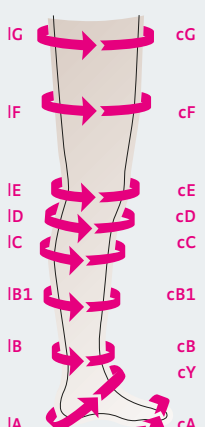
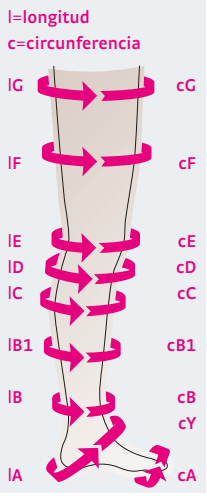
Ajuste estándar y sin costura		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG con banda superior, normal	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
AG con banda superior, ancha	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
I=longitud c=circunferencia 	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
	cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
	cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
	Medidas de longitud							
	IG regular	72-83 cm						
	IG corta	62-71 cm						
	ID regular	39-44 cm						
	ID corta	34-38 cm						
Pie		Talla de pie universal muy elástica, talla de calzado de 36-43						

Tabla de medidas

mediven plus® • mediven® comfort

Ajuste estándar y sin costura		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG con banda superior, normal	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
AG con banda superior, ancha	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
I=longitud c=circunferencia 	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
	cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
	cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
	Medidas de longitud							
	IG regular	72-83 cm						
	IG corta	62-71 cm						
	ID regular	39-44 cm						
	ID corta	34-38 cm						
Parte abdominal maxi		Solo con mediven plus AT Recomendamos una parte abdominal maxi a partir de una circunferencia corporal de:						
	Talla I-III	cT = desde 95 cm		cH = desde 110 cm				
	Talla IV-V	cT = desde 120 cm		cH = desde 135 cm				
	Talla VI-VII	cT = desde 140 cm		cH = desde 145 cm				
Pie		Talla de pie universal muy elástica, talla de calzado de 36-43						

Tablas de medidas mediven®

Tabla de medidas

mediven® forte

Ajuste estándar y sin costura		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG con banda superior, normal	cG	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70	
AG con banda superior, ancha	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80	
l=longitud									
c=circunferencia									
	Circunferencia en cm	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
		cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
		cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
		cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
		cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
		cB1	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
		cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33
		Medidas de longitud	IG regular	72-83 cm		Pie			
IG corta	62-71 cm		2 longitudes de pie, puntera cerrada						
ID regular	38-43 cm		Pie pequeño hasta 23 cm ≈ Talla de calzado 36-38						
ID corta	33-37 cm		Pie grande desde 23 cm en adelante ≈ Talla de calzado 38-43						


Tabla de medidas

mediven active® • mediven® for men mediven® angio

Ajuste estándar y sin costura		I	II	III	IV	V	VI	VII	
l=longitud									
c=circunferencia									
	Circunferencia en cm	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
Medidas de longitud	mediven active		Pie						
	∅D regular	43-49 cm		mediven active		puntera cerrada talla de calzado 38-48			
	∅D corta	37-42 cm		mediven for men		puntera cerrada talla de calzado 39-46			
	mediven for men		mediven angio		mediven angio		2 foot lengths, closed toe Small foot up to 25 cm ≈ talla de calzado 36-40 Large foot from 25 cm ≈ talla de calzado 40-46		

Ajuste correcto de las medias de compresión médica de tricotado circular


Nota: tenga en cuenta las medidas en el interior de la pierna, excepto para IG

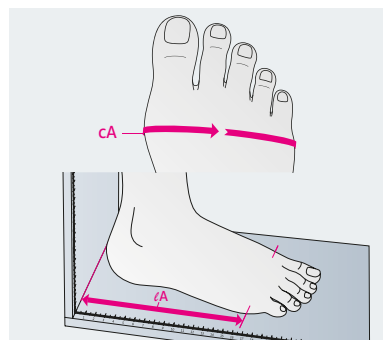

cA, lA, lZ


Mida la circunferencia **cA** justo detrás de la articulación en la base de los dedos, donde comienza el dedo meñique.

La longitud del pie en las medias con puntera abierta se determina por la medida de longitud **lA**, que se mide desde el extremo del talón hasta el punto de medida **cA**. La longitud del pie en las medias con puntera cerrada se mide desde el talón hasta la punta de los dedos. (medida **lZ**)

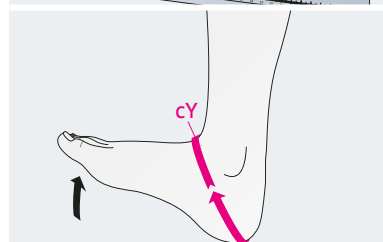


cY

Mida la circunferencia **cY** alrededor del talón y en el empeine, con el pie en máxima flexión dorsal.

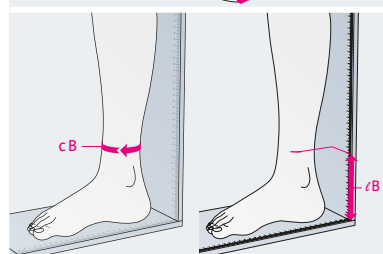


cB, lB

Mida la circunferencia **cB** y la longitud **lB** en la circunferencia más estrecha de la pierna por debajo de la rodilla, justo encima del tobillo. Esta medida por encima de los huesos del tobillo es especialmente importante para seleccionar la talla de la media, dado que la presión será aquí del 100 %.

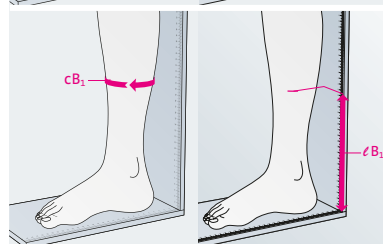


cB¹, lB¹

La medida de la circunferencia **cB¹** y la medida de la longitud **lB¹** se realizan donde comienza la pantorrilla o en el punto de transición al tendón de Aquiles.

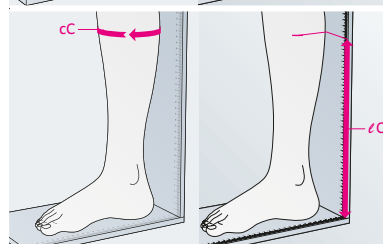


cC, lC

Mida la circunferencia **cC** y la longitud **lC** en la circunferencia más amplia de la pantorrilla.

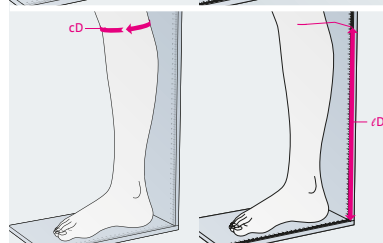


cD, lD

Mida la circunferencia **cD** y la longitud **lD** uno o dos dedos a lo ancho por debajo de la corva, al nivel de la cabeza del peroné.

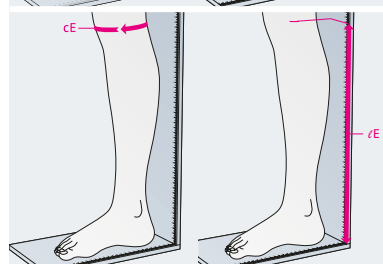


cE, lE

La medida de la circunferencia **cE** es la circunferencia de la rodilla medida a través de la corva en el centro de la rótula. Mida la longitud **lE** con la pierna recta.

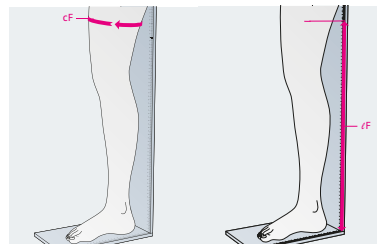


cF, lF

La medida de la circunferencia **cF** y la medida de la longitud **lF** se realizan donde comienza el músculo del muslo interior o en el centro del muslo

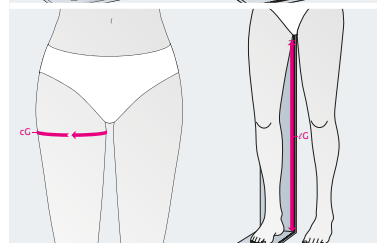


cG, lG

Mida **cG** y la longitud **lG** unos 3 cm por debajo de la entrepierna.

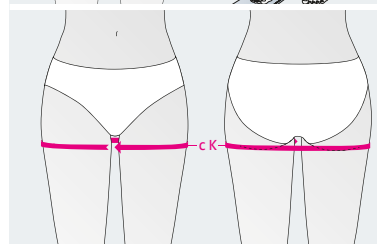


cK

Mida la circunferencia **cK** a la altura de la medida g, alrededor de ambas piernas.

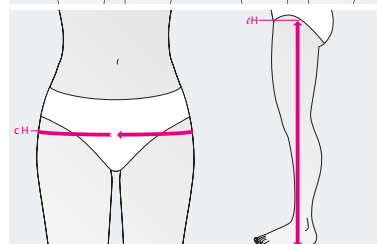


cH, lH

Mida la circunferencia **cH** al nivel de la cadera, en el punto más ancho de los glúteos.

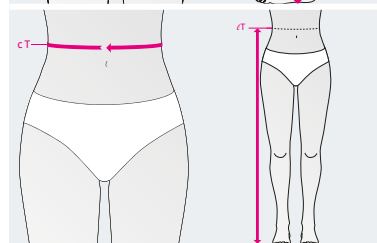


cT, lT

Mida la circunferencia **cT** alrededor de la cintura.

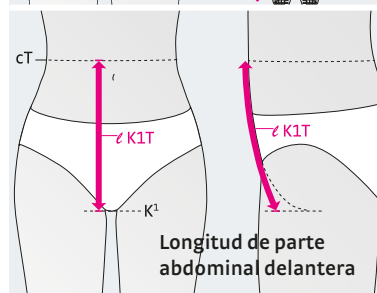

Longitud de parte abdominal delantera

Mida desde la entrepierna hasta la cintura. No obstante, es más cómodo para el paciente si se aleja 3 cm a un lado de la entrepierna y mide la longitud de la parte abdominal desde ahí.

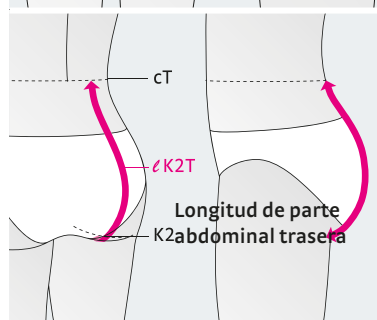

Longitud de parte abdominal trasera

Mida desde el pliegue glúteo hasta la cintura. Si el paciente solicita una parte abdominal más larga o más corta, deberá medir la longitud según las demandas del paciente. El punto «cintura» es únicamente la longitud estándar.

Gama de colores mediven®

Puede encontrar todas los colores de moda actuales en www.medi.de.

Color	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
Negro	●	●	●	●	●	●	●
Antracita	●	●	●	●	●	●	
Azul marino	●	●	●	●	●	●	
Cachemir	●		●	●		●	
Caramelo	●		●	●		●	●
Rosado	●		○	●		○	
Bronce	●		○	●		○	
Beige	●		○	●		○	
medi Magenta	○			○			
Blanco	○			○	●		
Marrón		●			●		

o Plazo de entrega de hasta 10 días laborables.

Resumen de la gama de productos mediven® Longitud y fijación

Longitud	Fijación	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
AD	Borde de tejido de punto	●	●	●	●	●	●	●
	Banda de puntos de silicona (NoB)	●		●	●		●	
	Banda de puntos de silicona estrecha (sNoB)	●		●	●		●	
AF	Borde de tejido de punto	●			●		●	
	Banda de micropuntos de silicona sensitive (MBs)	●		●	●		●	
	Banda de silicona sencilla con diseño de rosa (FBR)	●		●	●		●	
	Banda de puntos de silicona (NoB)	●		●	●		●	
	Banda de puntos de silicona con diseño (NoM)	●		●	●		●	
AG	Borde de tejido de punto	●			●		●	
	Sujeción en la cadera				●		●	
	Banda de micropuntos de silicona sensitive (MBs)	●		●	●		●	
	Banda de silicona sencilla con diseño de rosa (FBR)	●		●	●		●	
	Banda de puntos de silicona (NoB)	●		●	●		●	
	Banda de puntos de silicona con diseño (NoM)	●		●	●		●	

Longitud	Fijación	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
AT	Parte abdominal estándar	•			•		•	
	Parte abdominal confort			•				
	Parte abdominal maxi				•			
	Compr. ligera LT	•			•		•	
	Compr. moderada LT				•		•	
	Compr. elevada LT				•		•	
	Selección de escudete en páginas 59 – 68	•		•	•		•	
AT / U	LT cerrada	•			•		•	
	LT abierta	•			•		•	
	Compr. ligera LT	•			•		•	
	Selección de escudete en páginas 59 – 68	•			•		•	
AT / H	Acanalada				•		•	
	Compr. ligera LT				•		•	
	Compr. moderada LT				•		•	
	Compr. elevada LT				•		•	
	Selección de escudete en páginas 59 – 68				•		•	
AT / E	derecha				•		•	
	izquierda				•		•	
	Compr. ligera LT				•		•	
	Compr. moderada LT				•		•	
	Compr. elevada LT				•		•	
	Escudete para hombre				•		•	
	Escudete en U				•		•	
	Selección de escudete en páginas 59 – 68				•		•	

Clases de compresión		Productos
1 mild compression	Compresión en mmHg: 18,0 – 21,0 Compresión en kPa: 2,4 – 2,8	mediven elegance (puntera abierta + cerrada) mediven for men (puntera cerrada) mediven active (puntera cerrada) mediven comfort (puntera abierta + cerrada) mediven plus (puntera abierta + cerrada) mediven angio (puntera cerrada) duomed (puntera abierta + cerrada)
2 moderate compression	Compresión en mmHg: 23,0 – 32,0 Compresión en kPa: 3,1 – 4,3	mediven elegance (puntera abierta + cerrada) mediven for men (puntera cerrada) mediven active (puntera cerrada) mediven comfort (puntera abierta + cerrada) mediven plus (puntera abierta + cerrada) mediven forte (puntera abierta + cerrada) mediven angio (puntera cerrada) duomed (puntera abierta + cerrada)
3 strong compression	Compresión en mmHg: 34,0 – 46,0 Compresión en kPa: 4,5 – 6,1	mediven plus (puntera abierta + cerrada) mediven forte (puntera abierta + cerrada)

Contraindicaciones

De acuerdo con las directrices de la Sociedad alemana de flebología:

- Contraindicaciones absolutas: enfermedad oclusiva arterial periférica avanzada, insuficiencia cardiaca descompensada, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolens.
- Contraindicaciones relativas, dermatosis exudativa, intolerancia al material de las medias de compresión, perturbaciones sensoriales en las extremidades, neuropatía periférica avanzada (p. ej., diabetes mellitus), poliartritis crónica primaria.

medi no asumirá ninguna responsabilidad como resultado de cualquier uso contraindicado de este producto.





mediven sheer & soft®

Las medias de compresión más transparentes de medi. Pruebe un gran avance en la terapia de compresión. mediven sheer & soft lleva el confort a un nivel totalmente inédito. Al mismo tiempo, las medias de compresión son tan finas que únicamente usted sabrá que se trata de medias de compresión médica.

mediven sheer & soft®

Las medias de compresión más
transparentes de medi.

Consejo de medi¹:

Debido al grosor del material, al ajuste y a las características del producto, recomendamos mediven sheer & soft para:

- Mujeres
- Peso normal
- Sin tendencia a edema venoso
- Tejido conjuntivo firme

Indicaciones²

- Trastornos venosos crónicos: C0s a C2 de acuerdo con CEAP
- Fase inicial después de terapia para venas varicosas
- Trombosis venosa superficial
Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad

Características


- Extremadamente finas, no se distinguen de unas medias de moda
- Suaves y delicadas en la piel
- Disponibles con puntera abierta y cerrada



Banda atractiva



Media hasta la rodilla (AD)

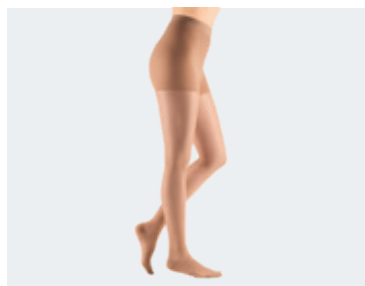

Panty (AT)



Puntera abierta – detalle

¹ Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.

² La selección de la media de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades individuales del paciente.

Ventajas del producto



mediven sheer & soft

Estilos	AD	AD pte.	AG	AG pte.
	hasta la rodilla	hasta la rodilla corta	muslo	muslo corta
15 – 20 mmHg	O140x11-7	O147x11-7	O161x11-7	O151x11-7
20 – 30 mmHg	O240x11-7	O247x11-7	O261x11-7	O251x11-7
Estilos	AT	AT pte.		
	panty	panty corto		
15 – 20 mmHg	O110x11-7	O117x11-7		
20 – 30 mmHg	O210x11-7	O217x11-7		

Encontrará los números de artículo en la última página

Estilos estándar

Talla de calzado 35 – 42

Composición del material

	Poliamida (PA)	Elastano (EL)
15-20 mmHg	64 %	36 %
20-30 mmHg	64 %	36 %

Instrucciones para el lavado

Lavar y poner
 Prenda apta para lavadora y secadora

Medidas de mediven sheer & soft

Talla	Circunferencia en cm						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG	42 – 57	45 – 61,5	49 – 66,5	52 – 73	56 – 79	60 – 84,5	64 – 87,5
cD	26 – 33,5	28 – 37	30 – 40	32 – 43	33,5 – 46,5	35,5 – 49,5	37,5 – 52,5
cC	28 – 35,5	30 – 39	32,5 – 42	35 – 45	37 – 48,5	39,5 – 51,5	41,5 – 54,5
cB	18 – 20	20,5 – 22,5	23 – 25	25,5 – 27,5	28 – 30	30,5 – 33	33,5 – 36
Longitud							
Media hasta la rodilla corta	34 – 38 cm			Media de muslo / panty corto:			62 – 71 cm
Media hasta la rodilla regular	39 – 44 cm			Media de muslo / panty regular:			72 – 83 cm

Material

Ligero

Compresión

15 – 20 mmHg,
20 – 30 mmHg

Colores disponibles

S = Estándar





mediven elegance[®]

¿Es realmente una media de compresión médica? ¡Claro! Se trata de un modelo que resalta la belleza femenina. La mediven elegance mima las piernas con su efecto de compresión. Y lo hace ajustándose a la pierna como una segunda piel. Se puede combinar con cualquier prenda de vestir y acentúa a la perfección la figura femenina. Nuestro lema es: La belleza que se ve.

mediven elegance. La compresión eficaz más atractiva que nunca.

mediven elegance®

Solo se ve belleza.

La compresión eficaz más atractiva que nunca.

Consejo de medi¹:

Debido al grosor del material, al ajuste y a las características del producto, recomendamos mediven elegance para:

- Mujeres
- Peso normal
- Sin tendencia a edema venoso
- Tejido conjuntivo firme

Indicaciones²

- Insuficiencia venosa crónica (IVC), estadio I según Widmer o C0s – C2 según CEAP
- Fase inicial después de un tratamiento de las varices
- Trombosis venosa superficial
- Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad
- Dermatitis inflamatoria de las piernas
- Náuseas y mareos durante el embarazo

Características

- Medias de estilo fino y transparentes
- La puntera suave y elástica garantiza una mayor libertad de movimiento de los dedos del pie
- Puño ancho y suave en las medias hasta la rodilla
- Talón más pequeño para evitar las arrugas en la media
- Atractivos diseños de banda en las medias hasta el muslo

Instrucciones para el lavado

Cuidado fácil    

Prenda apta para lavadora y secadora.



Puntera suave y elástica



Media hasta la rodilla (AD) con puño suave



Banda de silicona sencilla con diseño de rosas (FBR)

¹ Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.

² La selección de la media de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades individuales del paciente.

Ventajas del producto



cf. Ben Ammar, F. (DermScan): Evaluación clínica de la tolerancia cutánea de un dispositivo médico - test realizado bajo control dermatológico, Tunis 2012/2013.

mediven elegance

Estilos	AD	AD pte.	AG	AG pte.	AG / FBR
	media bajo rodilla	media bajo rodilla corta	muslo	muslo corta	muslo con banda de silicona
Clase 1	0140x11-7	0147x11-7	0160x11-7	0150x11-7	016Hx11-7
Clase 2	0240x11-7	0247x11-7	0260x11-7	0250x11-7	026Hx11-7
Estilos	AG pte. / FBR	AT	AT pte.	AT / U	AT / U pte.
	muslo corta con banda de silicona	panty	panty corto	panty para embarazadas	panty para embarazadas corto
Clase 1	015Hx11-7	0110x11-7	0117x11-7	0120x11-7	0127x11-7
Clase 2	025Hx11-7	0210x11-7	0217x11-7	0220x11-7	0227x11-7

Encontrará los números de artículo en la última página

Estilos estándar

Estándar	Talla I – VII, Longitud regular y corta, banda de silicona estándar y ancha
A medida	disponible
Modelos especiales	disponible, consulte las páginas 49 – 58
Borde	AD borde de tejido de punto, banda estrecha de puntos de silicona AF y AG borde de tejido de punto, banda de puntos de silicona, banda de puntos de silicona con diseño, banda de puntos de silicona sencilla con diseño de rosas, banda de micropuntos de silicona sensitive Todas las bandas son de estilos estándar.
Escudete	AT Escudete confort AT / U con parte superior cerrada
Parte para el pie	Puntera abierta, puntera cerrada, talla de calzado 36 – 43

Composición del material

	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	34 %	66 %
CCL 2	39 %	61 %

Consejo de medi:



medi Butler, para ponerse las medias con facilidad¹ Productos para el cuidado de la piel y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

¹ En general se aplica lo siguiente a las ayudas para la colocación y la retirada de las medias: Rabe E et al. Directriz S2k: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). (Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión médicas (MCS), Vendaje de compresión flebológico (PCB) y Sistemas de compresión adaptativos médicos (MAC). Publicado online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (último acceso: 02/03/2020)

Material

Ligero

Clase de compresión

CCL 1, 2

Colores disponibles

S = Estándar

M = A medida



* Plazo de entrega de hasta 10 días laborables.



Disponible con cristales brillantes.



mediven® for men

En general, es más difícil convencer a los hombres para que usen medias de compresión que a las mujeres.

No obstante, los argumentos en favor de mediven for men hablan por sí solos, por lo que son una gran ayuda.

Los calcetines de compresión presentan una estética de calcetines a la moda para hombre y son un complemento perfecto. Los elegantes calcetines con diseño „business rib“ son como una segunda piel.

mediven for men. Estética profesional a la moda.

mediven[®] for men

Los calcetines de compresión elegantes.

Consejo de medi¹:

Debido al grosor del material, al ajuste y a las características del producto, recomendamos mediven for men para:

- Hombres
- Peso normal
- Sin tendencia / tendencia ligera a edema venoso
- También apto para tejido conjuntivo blando

Indicaciones²

- Insuficiencia venosa crónica (IVC), estadios I y II según Widmer o COs – C3 según CEAP
- Edema por reperusión posoperatoria
- Edema postraumático, posoperatorio, ocupacional, inducido por medicamentos
- Edema causado por la inmovilidad
- Trombosis venosa superficial
- Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad
- Dermatitis inflamatoria de las piernas

Características

- Diseño anatómico de la puntera con prácticas marcas de derecha/izquierda para lograr un ajuste perfecto y la máxima comodidad para el usuario
- Diseño acanalado de estilo profesional
- Lanolina³ añadida para el cuidado y la protección de la piel
- Clima Fresh para conservar la frescura en la pierna y el pie
- Puño confort con anchura extra y especialmente suave
- Aptos para tallas de calzado 39 – 46

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo     

Prenda apta para lavadora y secadora.



Calcetines hasta la rodilla (AD) con un diseño profesional acanalado a la moda y puños confort



Pie con diseño anatómico con marcas de derecha e izquierda

¹ Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.

² La selección de la media de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades individuales del paciente.

³ Sustancia natural que se emplea para el tratamiento de pieles secas y agrietadas, con muchos tipos de aplicaciones; por ejemplo, en el cuidado de niños y bebés. El tratamiento protector sigue siendo efectivo tras el lavado.

Ventajas del producto



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Dr. Ben Ammar, F. (Dermatol.)
Evaluación clínica de la tolerancia cutánea de un dispositivo médico - test realizado bajo control dermatológico, Túnez 2012/2013.

mediven for men

Estilos	AD	AD pte.
	media bajo rodilla	media bajo rodilla corta
Clase 1	N.º de artículo 3A40x11-7	3A47x11-7
Clase 2	N.º de artículo 3B40x11-7	3B47x11-7

Encontrará los números de artículo en la última página

Estilos estándar

Estándar	Talla I – VII, Longitud estándar y corta
Modelos especiales	no disponible
Borde	AD Borde de tejido de punto
Parte para el pie	puntera cerrada talla de calzado 39 – 46

Composición del material

	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	23 %	77 %
CCL 2	29 %	71 %

Material



Ligero

Clase de compresión

CCL 1, 2

Colores disponibles

S = Estándar

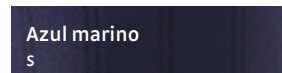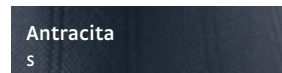

Consejo de medi:



medi Butler, para ponerse las medias con facilidad¹

Productos para el cuidado de la piel y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

¹ En general se aplica lo siguiente a las ayudas para la colocación y la retirada de las medias: Rabe E et al. Directriz S2k: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). (Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión médicas (MCS), Vendaje de compresión flebológica (PCB) y Sistemas de compresión adaptativos médicos (MAC)). Publicado online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (último acceso: 02/03/2020)





mediven[®] comfort

mediven comfort está elaborado con un material excepcionalmente suave. Con las medias de clase de compresión 1 y 2, la terapia y el tratamiento de los trastornos venosos no puede ser más cómoda. Gracias a su acabado con lanolina, cuida la piel con especial suavidad. ¿Cómo convencer a sus clientes de mediven comfort? ¡Deje que lo experimenten ellos mismos!

mediven comfort. La cara más tierna de la compresión.

mediven® comfort

No se siente más que suavidad.
La cara más tierna de la compresión.

Consejo de medi¹:

Debido al grosor del material, al ajuste y a las características del producto, recomendamos mediven comfort para:

- Mujeres
- Peso normal / sobrepeso²
- Tendencia de ligera a fuerte a edema venoso²
- Tejido conjuntivo firme

Indicaciones³

- Insuficiencia venosa crónica (IVC), estadios I a III según Widmer o C0s – C4 según CEAP
- Fase inicial después de un tratamiento de las varices
- Problemas de congestión y edema durante el embarazo
- Edema por reperusión posoperatoria
- Edema postraumático, posoperatorio, ocupacional, inducido por medicamentos
- Edema causado por la inmovilidad
- Trombosis venosa superficial
- Trastorno posterior a la trombosis, síndrome postrombótico
- Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad
- Dermatitis inflamatoria de las piernas
- Náuseas y mareos durante el embarazo

Características

- Material especialmente suave para facilitar la colocación y la retirada
- Lanolina⁴ añadida para el cuidado y la protección de la piel
- Suela de confort de doble punto para disfrutar de mayor comodidad al caminar



Parte abdominal confort



- Parte abdominal con forma cómoda
- Escudete confort elástico y muy resistente

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo     

Prenda apta para lavadora y secadora.



Suela de confort de doble punto

¹ Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.
² Use mediven comfort para edemas graves solo en pacientes con peso normal. Para personas con sobrepeso y edema grave, medi recomienda materiales más fuertes para prevenir marcas.
³ La selección de la media de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades individuales del paciente.
⁴ Sustancia natural que se emplea para el tratamiento de pieles secas y agrietadas, con muchos tipos de aplicaciones; por ejemplo, en el cuidado de niños y bebés. El tratamiento protector sigue siendo efectivo tras el lavado.



Banda de puntos de silicona

Ventajas del producto



mediven comfort

puntera abierta

Estilos	AD	AD pte.	AG / NoB	AG pte. / NoB	AT	AT pte.
	bajo rodilla	bajo rodilla corta	muslo con banda de silicona	muslo corta con banda de silicona	panty	panty corto
Clase 1	Z540x01-7	Z547x01-7	Z569x01-7	Z559x01-7	Z510x01-7	Z517x01-7
Clase 2	Z640x01-7	Z647x01-7	Z669x01-7	Z659x01-7	Z610x01-7	Z617x01-7

puntera cerrada

Estilos	AD	AD pte.	AG / NoB	AG pte. / NoB	AT	AT pte.
	bajo rodilla	bajo rodilla corta	muslo con banda de silicona	muslo corta con banda de silicona	panty	panty orto
Clase 1	Z540x11-7	Z540x11-7	Z569x11-7	Z559x11-7	Z510x11-7	Z517x11-7
Clase 2	Z640x11-7	Z640x11-7	Z669x11-7	Z659x11-7	Z610x11-7	Z617x11-7

Estilos estándar

Estándar	Talla I – VII, Longitud estándar y corta, banda de silicona estándar y ancha
A medida	disponible
Modelos especiales	disponible, consulte las páginas 49 – 58
Borde	AD borde de tejido de punto, banda estrecha de puntos de silicona AG Banda de puntos de silicona, banda de puntos de silicona con diseño, banda de puntos de silicona sencilla con diseño de rosas, banda de micropuntos de silicona sensitive Todas las bandas son de estilos estándar.
Escudete	AT Escudete confort
Parte para el pie	puntera abierta, puntera cerrada, talla de calzado 36 – 43

Composición del material

	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	32 %	68 %
CCL 2	35 %	65 %

Consejo de medi:



medi Butler, para ponerse las medias con facilidad¹ Productos para el cuidado de la piel y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

Encontrará los números de artículo en la última página

¹ En general se aplica lo siguiente a las ayudas para la colocación y la retirada de las medias: Rabe E et al. Directriz S2k: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). (Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión médicas (MCS), Vendaje de compresión flebológico (PCB) y Sistemas de compresión adaptativos médicos (MAC). Publicado online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (último acceso: 02/03/2020)

Material

Medio

Clase de compresión

CCL 1, 2

Colores disponibles

S = Estándar
M = A medida

Negro

S + M

Antracita

S + M

Azul marino

S + M

Cachemir

S + M

Caramelo

S + M

Rosado*

S + M

Bronce*

S + M

Beige*

S + M

* Plazo de entrega de hasta 10 días laborables.



Disponible con cristales brillantes.





mediven plus[®]

mediven plus cuenta con más de 40 años de experiencia y proporciona soluciones para multitud de indicaciones, tanto para hombre como para mujer. Las medias de compresión médica probadas con clases de compresión 1, 2 y 3, y con beneficios adicionales son una garantía de confianza, en todos los casos. Nuestro lema es: La fiabilidad que perdura.

mediven plus. La compresión nunca ha sido tan fiable.

mediven plus®

Todo lo que se siente es confianza. La compresión nunca ha sido tan fiable.

Consejo de medi¹:

Debido al grosor del material, al ajuste y a las características del producto, recomendamos mediven plus para:

- Mujeres/hombres
- Peso normal/sobrepeso
- Edema venoso de leve a fuerte
- También apto para tejido conjuntivo blando

Indicaciones²

- Insuficiencia venosa crónica (IVC), estadios I a III según Widmer o COs – C5 según CEAP
- Fase inicial después de un tratamiento de las varices
- Problemas de congestión y edema durante el embarazo
- Edema por reperusión posoperatoria
- Edema postraumático, posoperatorio, ocupacional, inducido por medicamentos
- Edema causado por la inmovilidad
- Trombosis venosa superficial
- Trombosis venosa profunda de la pierna
- Trastorno posterior a la trombosis, síndrome postrombótico
- Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad
- Dermatitis inflamatoria de las piernas
- Náuseas y mareos durante el embarazo

Características

- Muy resistentes y opacas
- Adaptación óptima gracias al nuevo talón plus, puntera optimizada, refuerzo de la suela en canalé y puño de 5 cm de ancho
- Especialmente recomendada para muslos más grandes
- Parte abdominal maxi como variante estándar

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo    

Prenda apta para lavadora y secadora.



Parte abdominal maxi como estándar



Talón plus y refuerzo en la suela



Puño ancho de 5 cm

¹ Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.

² La selección de la media de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades individuales del paciente.

Ventajas del producto



Clima Comfort



Clima Fresh



Variety



Perfect Fit



cf. Ben Ammar, F. (DermScan):
Evaluación clínica de la tolerancia
cutánea de un dispositivo médico- test
realizado bajo control dermatológico,
Tunis 2012/2013.

mediven plus

Estilos	AD	AD pte.	AG / NoB	AG / NoB pte.	AT	AT + parte abdominal maxi	AT pte.
	bajo rodilla	bajo rodilla corta	muslo con banda de silicona	muslo corta con banda de silicona	panty	panty con parte abdominal maxi	panty corto
Clase 1	4A40x01-7	4A47x01-7	4A61x01-7	4A51x01-7	4A10x01-7	4AZ0x01-7	4A17x01-7
Clase 2	4B40x01-7	4B47x01-7	4B61x01-7	4B51x01-7	4B10x01-7	4BZ0x01-7	4B17x01-7
Clase 3	4C40x01-7	4C47x01-7	4C61x01-7	4C51x01-7	4C10x01-7	4CZ0x01-7	4C17x01-7

Estilos	ATE	ATE pte.	AT / U	AT / U pte.	CT	BT
	panty de una pierna	panty de una pierna corto	panty para embarazadas	panty para embarazadas corto	shorts capri	leggings
	derecha	izquierda	derecha	izquierda		
Clase 1	4AE3x01-7	4AE2x01-7	4AV3x01-7	4AV2x01-7	4A20x01-7	4A27x01-7
Clase 2	4BE3x01-7	4BE2x01-7	4BV3x01-7	4BV2x01-7	4B20x01-7	4B27x01-7 a medida a medida
Clase 3	4CE3x01-7	4CE2x01-7	4CV3x01-7	4CV2x01-7	4C20x01-7	4C27x01-7

Estilos	ET	AT / H	AT / H pte.	AG	AG pte.		
	short ciclista	leotardos para hombre	leotardos para hombre corto	muslo con sujeción de cintura	muslo con sujeción de cintura corto		
		derecha	izquierda	derecha	izquierda		
Clase 1		4A30x01-7	4A37x01-7	4A63x01-7	4A62x01-7	4A53x01-7	4A52x01-7
Clase 2	a medida	4B30x01-7	4B37x01-7	4B63x01-7	4B62x01-7	4B53x01-7	4B52x01-7
Clase 3		4C30x01-7	4C37x01-7	4C63x01-7	4C62x01-7	4C53x01-7	4C52x01-7

Encontrará los números de artículo en la última página

Material

Medio

Clase de compresión

CCL 1, 2, 3

Colores disponibles

S = Estándar

M = A medida

Negro

S + M

Antracita

S + M

Azul marino

S + M

Cachemir

S + M

Caramelo

S + M

Rosado

S + M

Bronce

S + M

Beige

S + M

medi Magenta*

S + M

Blanco*

S + M

* Plazo de entrega de hasta 10 días laborables.



Disponible con cristales brillantes.


Estilos estándar

Estándar	Talla I – VII, Longitud regular y corta, banda de silicona estándar y ancha	
A medida	posible	
Modelos especiales	posible, consulte las páginas 49 – 58	
Borde	AD	borde de tejido de punto, banda estrecha de puntos de silicona
	AF y AG	Banda de puntos de silicona, banda de puntos de silicona con diseño, banda de puntos de silicona sencilla con diseño de rosas, banda de micropuntos de silicona sensitive
	Todas las bandas son de estilos estándar	
Escudete	AT	Talla I – III: Escudete de entrepierna Talla I – VII: Escudete estrecho, espalda a cintura
	Parte abdominal maxi:	Talla I – III: escudete estrecho, espalda a cintura
		Talla IV – V: escudete ancho, espalda a cintura
		Talla VI – VII: escudete estrecho, espalda a cintura
	AT / U	con parte superior cerrada
AT / H	apertura horizontal	
Parte para el pie	puntera abierta, puntera cerrada, talla de calzado 36 – 43	

Composición del material

	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	25 %	75 %
CCL 2	31 %	69 %
CCL 3	37 %	63 %

Consejo de medi:

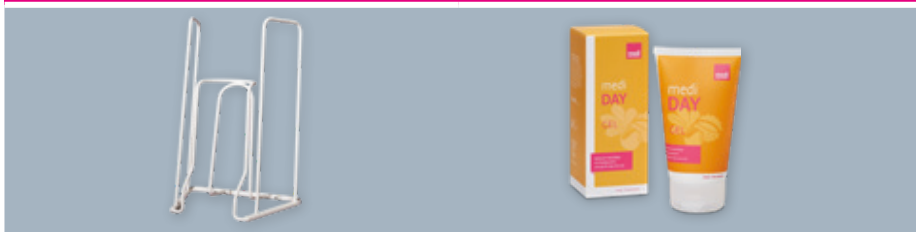

medi Butler, para ponerse las medias con facilidad¹

Productos para el cuidado de la piel y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

Opcional mediven plus AD extra-ancha, puntera abierta o cerrada, clase 1, 2 y 3.
Plazo de entrega hasta 10 días laborables.

¹ En general se aplica lo siguiente a las ayudas para la colocación y la retirada de las medias: Rabe E et al. Directriz S2k: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). (Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión médicas (MCS), Vendaje de compresión flebológico (PCB) y Sistemas de compresión adaptativos médicos (MAC)). Publicado online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (último acceso: 02/03/2020)





mediven active[®]

Los hombres con mucha actividad, por ejemplo por motivos profesionales, necesitan una medias de compresión médica robustas. Deben soportar cargas elevadas y ofrecer un ajuste perfecto en el calzado. Las medidas de compresión para hombres con un fino acanalado deportivo son muy suaves e imposibles de reconocer como medias de compresión médica. Demuestre a sus clientes que existen medias de compresión con una estética masculina.

mediven active. Para hombres activos.



mediven active®

Un calcetín de compresión resistente.

Consejo de medi¹:

Debido al grosor del material, al ajuste y a las características del producto, recomendamos mediven active para:

- Hombres
- Peso normal/sobrepeso
- Tendencia de ligera a fuerte a edema venoso
- También apto para tejido conjuntivo blando

Indicaciones²

- Insuficiencia venosa crónica (IVC), estadios I y II según Widmer o COs – C4 según CEAP
- Edema por reperusión posoperatoria
- Edema postraumático, posoperatorio, ocupacional, inducido por medicamentos
- Edema causado por la inmovilidad
- Trombosis venosa superficial
- Trastorno posterior a la trombosis, síndrome postrombótico
- Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad
- Dermatitis inflamatoria de las piernas

Características

- Costura imperceptible y apenas visible
- Diseño acanalado fino, prácticamente indistinguible de los calcetines masculinos
- Suela de confort con refuerzo en el talón que resiste incluso las condiciones más duras
- Puño suave y ancho para aumentar la comodidad de uso
- Tejido de punto muy robusto
- Aptos para tallas de calzado 38 – 48

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo    

Prenda apta para lavadora y secadora.



Puntera sin costura



Suela de confort

¹ Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.

² La selección de la media de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades individuales del paciente.

Ventajas del producto



cf. Ben Ammar, F. (DermScan):
Evaluación clínica de la tolerancia
cutánea de un dispositivo médico - test
realizado bajo control dermatológico,
Tunis 2012/2013.

mediven active

Estilos	AD	AD pte.
	bajo rodilla	bajo rodilla corta
Clase 1	N.º de artículo 3540x11-7	3547x11-7
Clase 2	N.º de artículo 3640x11-7	3647x11-7

Encontrará los números de artículo en la última página

Estilos estándar

Estándar	Talla I – VII, Longitud regular y corta
Modelos especiales	no disponible
Borde	AD Borde de tejido de punto
Parte para el pie	puntera cerrada talla de calzado 38 – 48

Composición del material

	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	10 %	90 %
CCL 2	11 %	89 %

Material



Fuerte

Clase de compresión

CCL 1, 2

Colores disponibles

S = Estándar

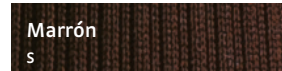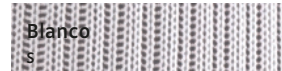

Consejo de medi:



medi Butler, para ponerse
las medias con facilidad¹

Productos para el cuidado de la piel
y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

¹ En general se aplica lo siguiente a las ayudas para la colocación y la retirada de las medias: Rabe E et al. Directriz S2k: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). (Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión médicas (MCS), Vendaje de compresión flebológica (PCB) y Sistemas de compresión adaptativos médicos (MAC)). Publicado online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (último acceso: 02/03/2020)



mediven® forte

Estas medias mantienen las indicaciones crónicas bajo control. No en vano, se trata de asegurar a los clientes con problemas venosos importantes que puedan mantener una vida normal, sacrificando lo menos posible.

Las medias mediven forte proporcionan la máxima estabilidad en la presión a lo largo de todo el día. Su material resistente consigue el efecto de profundidad necesario. Las medias son además muy duraderas y resistentes.

mediven forte. Compresión agradable con un rendimiento inigualable.



mediven® forte

No se siente más que protección. Compresión agradable con un rendimiento inigualable.

Indicaciones²

Consejo de medi¹:

Debido al grosor del material, al ajuste y a las características del producto, recomendamos mediven forte para:

- Mujeres/hombres
- Sobrepeso / obesidad
- Tendencia de ligera a fuerte a edema venoso
- También apto para tejido conjuntivo blando

- Insuficiencia venosa crónica (CVI), estadios I a III según Widmer o C0s – C5 según CEAP
- Fase inicial después de un tratamiento de las varices
- Insuficiencia venosa funcional debido a la obesidad
- Problemas de congestión y edema durante el embarazo
- Edema por reperfusión posoperatoria
- Edema postraumático, posoperatorio, ocupacional, inducido por medicamentos
- Edema causado por la inmovilidad
- Trombosis venosa superficial
- Trombosis venosa profunda de la pierna
- Trastorno posterior a la trombosis, síndrome postrombótico
- Profilaxis de la trombosis en pacientes con movilidad
- Dermatitis inflamatoria de las piernas
- Náuseas y mareos durante el embarazo

Características

- Material extremadamente resistente y sin costuras para disfrutar de una comodidad de uso óptima
- Máxima estabilidad en la presión (presión de trabajo elevada para aportar un profundo efecto funcional)
- Puño suave y estable en el acabado AD
- Opacas
- Clima Fresh en toda la pierna que aporta una sensación de frescura las veinticuatro horas
- Dos longitudes de pierna en las series con puntera:
 - Pie pequeño hasta 23 cm
 - Pie grande desde 23 cm

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo    

Prenda apta para lavadora y secadora.



Puntera abierta – detalle



Tejido de doble punto



Puño suave y estable en el acabado AD

¹ Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.
² La selección de la media de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades individuales del paciente.

Ventajas del producto



Clima Fresh



Variety



Perfect Fit



cf. Ben Ammar, F. (DermScan):
Evaluación clínica de la tolerancia
cutánea de un dispositivo médico - test
realizado bajo control dermatológico,
Tunis 2012/2013.

mediven forte

Estilos	AD	AD pte.	AG / NoB	AG pte. / NoB		
	bajo rodilla	bajo rodilla corta	muslo con banda de silicona	muslo corta con banda de silicona		
Clase 2	F240x01-7	F247x01-7	F260x01-7	F250x01-7		
Clase 3	F340x01-7	F347x01-7	F360x01-7	F350x01-7		
Estilos	AG	AG pte.				
	muslo con sujeción de cintura	muslo corta con sujeción de cintura				
	derecha	izquierda	derecha	izquierda		
Clase 2	F263x01-7	F262x01-7	F253x01-7	F252x01-7		
Clase 3	F363x01-7	F362x01-7	F353x01-7	F352x01-7		
Estilos	AT	ATE	AT pte.	AT / U	BT	
	panty	panty de una pierna	panty corto	panty para embarazadas	leggings	
Clase 2	F210x01-7	a medida	F217x01-7	a medida	a medida	
Clase 3	F310x01-7		F317x01-7			
Estilos	CT	ET	AT / H	AT / H pte.		
	shorts capri	short ciclista	leotardos para hombre	leotardos para hombre cortos		
Clase 2	a medida	a medida	a medida	a medida		
Clase 3						

Encontrará los números de artículo en la última página

Material

Fuerte

Clase de compresión

CCL 2, 3

Colores disponibles

S = Estándar
M = A medida

Negro

S + M

Antracita

S + M

Azul marino

S + M

Cachemir

S + M

Caramelo

S + M

Rosado*

S + M

Bronce*

S + M

Beige*

S + M

* Plazo de entrega de hasta 10 días laborables.



Disponible con cristales brillantes.

Estilos estándar

Estándar	Talla I – VII, Longitud regular y petite, banda de silicona regular y ancha	
A medida	disponible	
Modelo especial	disponible, consulte las páginas 49 – 58	
Borde	AD	Borde de tejido de punto, banda estrecha de puntos de silicona
	AF y AG	Borde de tejido de punto, banda de puntos de silicona, banda de puntos de silicona con diseño, banda de puntos de silicona sencilla con diseño de rosas, banda de micropuntos de silicona sensitive
	Todas las bandas son de estilos estándar	
Escudete	AT	Tallas I – III escudete en la ingle Tallas IV – VII escudete estrecho en la espalda hasta la cintura,
	AT / U	con parte superior cerrada
	AT / H	apertura horizontal
Parte para el pie	puntera abierta, puntera cerrada	

Composición del material

	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 2	36%	64%
CCL 3	36%	64%

Consejo de medi:



medi Butler, para ponerse las medias con facilidad¹

Productos para el cuidado de la piel y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

¹ En general se aplica lo siguiente a las ayudas para la colocación y la retirada de las medias: Rabe E et al. Directriz S2k: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). (Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión médicas (MCS), Vendaje de compresión flebológico (PCB) y Sistemas de compresión adaptativos médicos (MAC)). Publicado online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (último acceso: 02/03/2020)




COMPRESIÓN para enfermedad venosa crónica y EAP / Diabetes ?

Lana merino en todo el pie

Sólida estructura acanalada

Sí, ¡claro!*

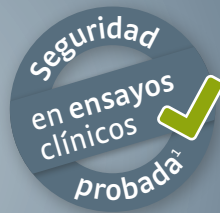

Acollchado suave exclusivo desde encima de los tobillos hasta el final de la puntera

Costura extralarga y plana

Mediven® angio — Seguridad hasta los dedos del pie

mediven® angio

La terapia de compresión en pacientes con trastornos venosos y enfermedades asociadas, tiene requisitos especiales para una media de compresión. Por lo que mediven angio se desarrolló especialmente para este tipo de pacientes y es la solución óptima para pacientes con enfermedad venosa crónica y enfermedad arterial periférica (EAP) asociada y/o diabetes mellitus.

Esta media de compresión es única. mediven angio es la primera y única media médica de compresión cuya seguridad ha sido científicamente evaluada y probada en pacientes con enfermedad venosa crónica y EAP de leve a moderada asociada y/o diabetes mellitus.¹

Seguridad de tratamiento – hasta los dedos del pie.

mediven® angio

Seguridad de tratamiento – hasta los dedos del pie.



Consejo medi²:

A tenor de las características del producto y de los resultados del ensayo clínico¹ recomendamos mediven angio para:

- Mujeres / hombres con enfermedad venosa crónica
- Enfermedad arterial periférica de leve a moderada concomitante (EAP)
- Diabetes mellitus concomitante

Indicaciones³

- Enfermedad venosa crónica, estadio I a III según Widmer o C₀s – C5 según CEAP

Características del producto

- Acolchado suave exclusivo desde la punta de los dedos hasta por encima de los tobillos – reduce picos de presión y evita lesiones en las estructuras óseas prominentes (por ejemplo tobillo, punta de los dedos del pie)
- Felpa con lana merino fina y natural para una termoregulación óptima y una mayor comodidad de uso
- Costura extralarga y plana que se sitúa cómodamente alrededor de los dedos del pie, lo que crea una forma anatómica en la puntera, para un alivio de la presión en la puntera y en las articulaciones
- Sólida estructura acanalada para una relación ideal entre la presión de trabajo y de reposo, que sirve de orientación para una colocación correcta
- Microfelpa en toda la parte inferior de la pierna, desde los dedos de los pies hasta (la terminación?) para una gran comodidad de uso
- La terminación extra-ancha asegura una amplia distribución de la presión, evitando constricciones
- Gracias al diseño de 90°, el talón permite una distribución uniforme del tejido de punto en la zona del talón y del empeine
- Disponible en dos longitudes de pie para un ajuste óptimo del pie y alivio adicional en el dedo gordo del pie

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo     

Prenda apta para lavadora y secadora.



mediven angio Caramelo

Consejo de medi:



medi Butler, para ponerse las medias con facilidad⁴

Productos para el cuidado de la piel y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

* Seguridad del producto probada en un ensayo clínico: El uso de las medias de compresión médicas mediven angio es seguro en pacientes con enfermedades venosas crónicas y enfermedad arterial periférica de leve a moderada concomitante (EAP) o diabetes mellitus.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

² Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni al asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos.

³ Seleccionar las medias de compresión ideal depende de la indicación y de las necesidades del paciente.

⁴ En general se aplica ayudas para poner y sacarse las medias: Rabe E et al. Medical compression therapy of the extremities with medical compression stockings (MCS), phlebological compression bandages (PCB), and medical adaptive compression systems (MAC): S2k guideline of the German Phlebology Society (DGP) in cooperation with the following professional associations: DDG, DGA, DGG, GDL, DGL, BVP. Hautarzt 2021;72(2):137-152.

mediven® angio


La solución para pacientes con enfermedad venosa crónica y asociada a diabetes mellitus.



Terminación extra ancha

Ajuste fiable en la pierna sin deslizamiento hacia abajo

- ✓ Evita constricciones

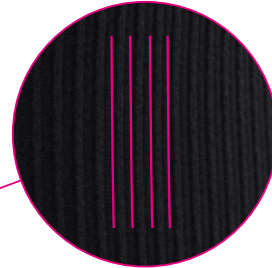

Sólida estructura acanalada

Relación ideal entre la presión de trabajo y de reposo

- ✓ Efecto de compresión optimizado en el sistema venoso con el debido respeto al estado vascular arterial y/o a la ausencia de sensibilidad a la presión y al dolor



Costura extralarga y plana

La costura termina en el extremo proximal de las articulaciones metatarsofalángeas I y V

- ✓ Reducción de los picos de presión para evitar que se desarrollen lesiones en los dedos de los pies y las articulaciones

Lana merino en todo el pie





Acolchado suave exclusivo desde la puntera hasta por encima de los tobillos

- ✓ Reducción de los picos de presión y prevención de lesiones en los puntos óseos habituales (p. ej. tobillo, cabezas metatarsales)



mediven® angio

Tratamiento seguro, hasta los dedos del pie.

mediven angio				
Modelos	AD	AD	AD pte.	AD pte.
				
	pantorrilla pie pequeño	pantorrilla pie grande	pantorrilla corta pie pequeño	pantorrilla corta pie grande
CCL 1	3X40Δ11-7	3X40Δ21-7	3X47Δ11-7	3X47Δ21-7
CCL 2	3Y40Δ11-7	3Y40Δ21-7	3Y47Δ11-7	3Y47Δ21-7

Δ = Añadir 1 para color caramelo y 5 para color negro

Elija la talla con el último dígito del número de artículo, entre 1 y 7.

Estilos estándar	
Tallas	Talla I – VII, Longitud regular y petite,
Posibilidad de tallaje a medida	posible
Modelos especiales	no disponible
Borde	borde extra ancho
Puntera	Cerrado Pequeño: pies hasta 25 cm- talla de calzado 36 – 40 Largo: pies desde 25 cm- talla de calzado 40 – 46

Composición del material			
	Poliamida (PA)	Elastano (EL)	Lana Merino
CCL 1	71 %	22 %	7 %
CCL 2	70 %	23 %	7 %



mediven angio Caramelo



mediven angio Negro

Material

Medio

Clases de compresión

CCL 1, 2


Ventajas del producto



Clima Comfort



Clima Fresh

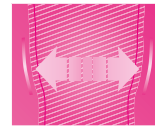

Perfect Fit



Variety



Colores disponibles

S = estándar

M = a medida*

Negro
S+M

Caramelo
S+M

* Plazo de entrega de hasta 10 días laborables.

Nota

Para más información por favor visita: medi.biz/angio

Novedad

mediven® angio: las primeras y únicas medias de compresión médicas cuya seguridad se ha evaluado y probado científicamente en pacientes con enfermedad venosa crónica EAP concomitante o diabetes mellitus.*

Características del producto exclusivas

mediven angio was particularly developed for patients with chronic venous disease. mediven angio se ha desarrollado especialmente para pacientes con enfermedad venosa crónica y EAP de leve a moderada y/o diabetes mellitus y se ha adaptado de forma óptima a sus necesidades.

Seguridad exclusiva

En un ensayo clínico¹ con ambos tipos de pacientes, se ha evaluado y probado científicamente la seguridad de mediven angio:


- ✓ Flujo sanguíneo estable hasta el vaso sanguíneo más pequeño
- ✓ Sin lesiones en la piel
- ✓ Sin constricción
- ✓ Sin puntos de presión
- ✓ Alta comodidad de uso

Confirmado para las clases de compresión 1 y 2



* Seguridad del producto probada en un ensayo clínico: El uso de las medias de compresión médicas mediven angio es seguro en pacientes con enfermedades venosas crónicas y enfermedad arterial periférica de leve a moderada concomitante (EAP) o diabetes mellitus.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.



Modelos especiales medi® de tejido circular

Son versiones especiales disponibles para todas aquellas variantes de tejidos de las medias anteriores, más allá de la gama de tejidos mediven estándar. Este resumen le ayudará a seleccionar y ofrecer los complementos perfectos para proporcionar la mejor solución a cada uno de los pacientes. Las versiones especiales de mediven tienen en cuenta las particularidades de los pacientes con una enfermedad venosa y garantizan un uso cómodo y agradable, combinado con un tratamiento más sencillo. Cumplimiento significa una mayor adhesión al tratamiento por parte de los pacientes. Mejore las probabilidades de repetir ventas y aumentar así la fidelidad a largo plazo de sus clientes.



Punteras de modelos estándar

Puntera abierta

Consejo de medi:

- Puntera abierta disponible si lo solicita el paciente, según sus preferencias



	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional

Puntera cerrada

Consejo de medi:

- Talla de pie universal: mediven elegance, mediven plus y mediven comfort
Talla de calzado 36 – 43
- Dos tallas de pie para mediven forte:
 - Pequeño, hasta 23 cm
 - Grande, desde 23 cm



	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional

Punteras de modelos especiales

Puntera suave

Consejo de medi:

- Para clientes con sensibilidad en la zona de los dedos (p. ej., dedo en martillo) y que prefieren por tanto una puntera especialmente suave

Nota: Pueden producirse ligeras variaciones de color a causa de los distintos materiales del punto.



	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional

Sección de puntera con hallux valgus

Consejo de medi:

- Para clientes que necesitan libertad de movimiento en los dedos



	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
En caso de modificación	–	–	–	–

Puntera anatómica

Consejo de medi:

- Para clientes con hipersensibilidad en la zona de la puntera
- Especialmente adecuada para zapatos estrechos (p. ej., zapatos profesionales)

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
En caso de modificación	–	–	–	–



Las punteras Jersey se pueden alargar o acortar de acuerdo con las especificaciones

Consejo de medi:

- Entrega personalizada según las medidas específicas del cliente

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional



**Puntera Jersey
alargada según las especificaciones**



**Puntera Jersey
acortada según las especificaciones**

Borde Jersey alargado en el pie de acuerdo con las especificaciones

Consejo de medi:

- Entrega personalizada según las medidas específicas del cliente

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional



Longitud del pie acortada de acuerdo con las especificaciones

Consejo de medi:

- Entrega personalizada según las medidas específicas del cliente

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional



Segmentos antideslizantes

Los segmentos antideslizantes aportan mayor confianza. Consiguen que caminar con las medias resulte más seguro y ofrece a los pacientes mayor agarre en el calzado.

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional




Parte abdominal

Panty con parte abdominal de compresión

Consejo de medi:

Sujeción segura y mayor comodidad de uso

- Para clientes que requieren una circunferencia amplia en la parte abdominal
- Para clientes con tejido conjuntivo blando
- Con debilidad en los músculos abdominales o diástasis

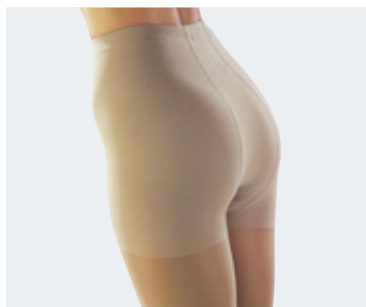

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	–	–
A medida	Cargo adicional	Cargo adicional	–	Cargo adicional

Parte abdominal más larga / más corta

Consejo de medi:

Sujeción segura y mayor comodidad de uso

- Alargada para clientes con un cuerpo más robusto o glúteos más grandes

Consejo de medi:

Sujeción segura y mayor comodidad de uso

- Acortada para clientes con glúteos más pequeños (posibilidad de uso a la altura de la cintura)



	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	–	–
A medida	sin suplemento	sin suplemento	–	sin suplemento
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	–	Cargo adicional

Parte abdominal delantera / trasera, más larga / más corta

Consejo de medi:

Sujeción segura y mayor comodidad de uso

- Alargada en la parte delantera o acortada en la trasera para clientes con glúteos más pequeños pero con un cuerpo más robusto

Consejo de medi:

Sujeción segura y mayor comodidad de uso

- Acortada en la parte delantera o alargada en la trasera para clientes con glúteos sobredesarrollados pero con menos cuerpo



Nota: Las diferencia de longitud entre la parte abdominal delantera y trasera puede ser como máximo de 9 cm.

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	–	Cargo adicional
A medida	sin suplemento	sin suplemento	–	sin suplemento
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	–	Cargo adicional

Panty con entrepierna abierta

Consejo de medi:

Mayor comodidad para el usuario y más práctico para el uso diario

- Para clientes con muy poca libertad de movimientos
- Para pacientes con incontinencia
- Para pacientes con catéteres permanentes
- Para clientes con micosis ginecológica



	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	–	–
A medida	sin suplemento	sin suplemento	–	sin suplemento
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	–	Cargo adicional

Panty con abertura para estoma

Consejo de medi:

Mayor comodidad para el usuario y más práctico para el uso diario

- Para pacientes con estoma

Atención:

- Para el tratamiento inicial, primero el cliente se pone el panty y luego se marca la abertura del estoma.
- Envíe los panties a medi para que elaboren la abertura. De esta forma, podrá ubicarse con precisión.
- Envíe la «plantilla» en caso de que se repita el tratamiento.




	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Estándar	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
A medida	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional

Panty de una pierna

Consejo de medi:

- Como alternativa a la fijación en la cadera o la banda

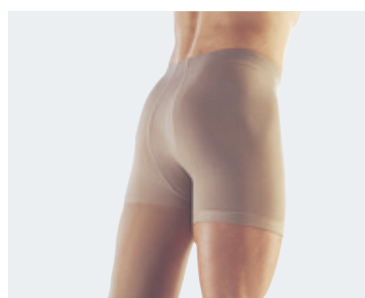

	mediven elegance	mediven plus*	mediven comfort	mediven forte*
Estándar	–	Cargo adicional	–	–
A medida	–	Cargo adicional	–	Cargo adicional

* Suplementos basados en el precio de AG con borde de tejido de punto

Bandas de silicona de modelos estándar

Banda de micropuntos de silicona, banda de puntos de silicona con diseño, banda de micropuntos de silicona sensitive, banda de silicona sencilla con diseño de rosas

Banda de silicona sencilla con diseño de rosas (FBR)

Consejo de medi: agarre fiable, probado y contrastado, gracias al revestimiento plano. Diseño elegante y femenino. Banda fina de excelente calidad.

Banda de puntos de silicona (NoB)

Consejo de medi: agarre fiable, probado y contrastado, gracias a la estructura punteada. Buena circulación de aire. Diseño neutro. Banda resistente y robusta.



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



Banda de silicona sencilla con diseño de rosas (FBR)



Banda de puntos de silicona (NoB)



Banda de puntos de silicona con diseño (NoM)



Banda de micropuntos de silicona sensitive (MBs)

Banda de puntos de silicona con diseño (NoM)

Consejo de medi: agarre fiable, probado y contrastado, gracias a la estructura moteada. Buena circulación de aire. Diseño de moda. Banda resistente y robusta.

Banda de micropuntos de silicona sensitive (MBs)

Consejo de medi: micropuntos finos y apenas perceptibles en el reverso para disfrutar de un agarre fiable. Muy buena circulación de aire. Diseño neutro. Banda fina de excelente calidad.


mediven elegance*	(FBR) Banda de silicona sencilla con diseño de rosas	(NoB) Banda de puntos de silicona	(NoM) Banda de puntos de silicona con diseño	(MBs) Banda de micropuntos de silicona sensitive
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
mediven comfort*				
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
mediven plus*				
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional
mediven forte*				
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
A medida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
En caso de modificación	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional	Cargo adicional

*Suplementos basados siempre en el precio con banda de silicona

Sujeción de cintura

Consejo de medi:

- Sujeción segura y mayor comodidad de uso
- Para clientes con muslos pesados o cónicos
- Para muslos muy blandos
- Para alérgicos (alternativa a la banda con revestimiento de silicona)
- Para clientes que, por la acción mecánica de las bandas, tienden a sufrir reacciones en la piel

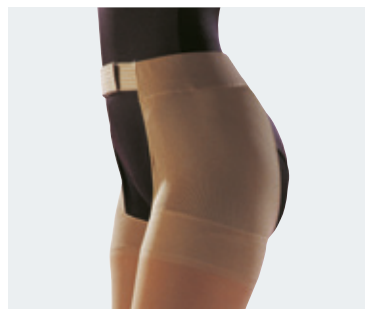


	mediven elegance	mediven plus*	mediven comfort	mediven forte*
Estándar	–	Cargo adicional	–	Cargo adicional
A medida	–	Cargo adicional	–	Cargo adicional
En caso de modificación	–	Cargo adicional	–	Cargo adicional

* Suplementos basados en el precio de AG con borde de tejido de punto

Suspendores de medias

Suspendores de medias con tira, ajustable con 2 o 4 suspendores. Se puede usar con todos los estilos.

Cara única en las tallas	1	2	3
Cintura	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm
Cara doble en las tallas	1	2	3
Cintura	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm

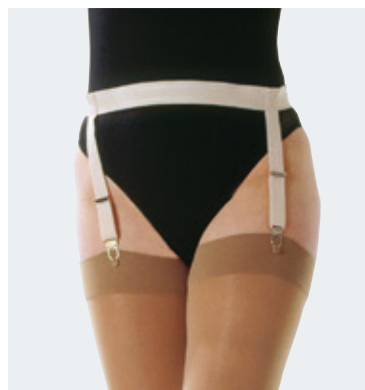

Material por metros (1 m, 5 m)

Se puede pedir lo que se necesite.

- Banda de puntos de silicona (NoB)
- Banda de puntos de silicona con diseño (NoM)
- Banda de silicona sencilla con diseño de rosa (FBR)
- Banda de micropuntos de silicona sensitive (MBs)

En todos los colores, composición: silicona, poliamida, poliéster, elastano



Variantes de escudete de mediven®

Los escudetes están tejidos en la zona de la ingle del panty de compresión. En las siguientes páginas encontrará una descripción general del «escudete estándar» que se emplea en todos los modelos de tejido circular.

Además, puede elegir entre otras variantes de escudete para tallas estándar y prendas a medida para sus clientes, dado que una talla en centímetros no dice mucho sobre la anatomía del paciente con un trastorno venoso o sobre la proporción entre el abdomen y las nalgas. Junto a las imágenes, una descripción simplifica la selección del escudete adecuado. Un panty de compresión óptimo proporciona a quien lo usa una comodidad absoluta en la parte abdominal.





Modelos
especiales de
tejido circular

Variantes estándar de escudete mediven®

Escudete estándar	mediven elegace	mediven plus	mediven forte	mediven comfort
Escudete confort	Tallas I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145			Tallas I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 135
Escudete de entrepierna Abdomen pequeño y nalgas pequeñas Para mujeres con abdomen y nalgas menos pronunciados		Tallas I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110	Tallas I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110	
Escudete estrecho en la espalda Abdomen pequeño y nalgas grandes Para mujeres con nalgas pronunciadas pero abdomen relativamente plano		Tallas IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145 Parte abdominal maxi Tallas I – III cT 95 – 140 cH 110 – 150	Tallas IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145	
Escudete ancho en la espalda Abdomen grande y nalgas muy grandes Para mujeres con nalgas pronunciadas pero abdomen plano en comparación		Parte abdominal maxi Tallas IV – V cT 120 – 150 cH 135 – 160		
Escudete extraancho en la espalda Abdomen muy grande y nalgas muy grandes Para mujeres con nalgas y abdomen pronunciados		Parte abdominal maxi Tallas VI – VII cT 140 – 165 cH 145 – 170		
Panty para embarazadas AT / U, cerrado Abdomen en crecimiento Adecuado para embarazadas con una gran circunferencia abdominal en crecimiento	Tallas I – VII cT a partir de 60 cH a partir de 80	Tallas I – VII cT a partir de 60 cH a partir de 80		
Leotardos para hombre, bragueta horizontal Para hombre, con bragueta		Tallas I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145		

Escudete confort

Escudete estándar

Modelo estándar

Modelos	mediven elegace, mediven comfort
Tallas	I – VII

A medida

Modelos	mediven elegace, mediven comfort
Solicite en el pedido	«Entrepierna de confort»

Escudete de entrepierna

Escudete estándar


Para mujeres con abdomen y nalgas pequeños.

Modelo estándar


Modelos	mediven plus, mediven forte
Tallas	I – III

A medida


Modelos	mediven plus, mediven forte
Solicite en el pedido	«Escudete pequeño solo en entrepierna»

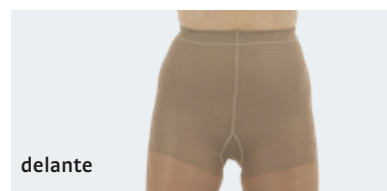


delante

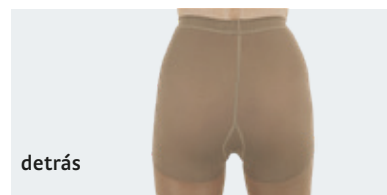

detrás

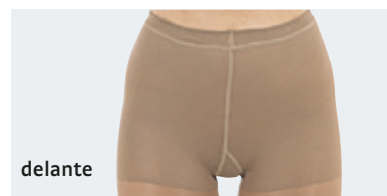

delante

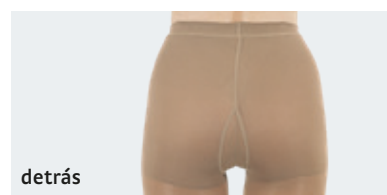

detrás

Parte abdominal maxi

Para mujeres con grandes circunferencias de cadera y cintura.

Modelo especial

Modelos	mediven plus
Tallas	I – VII
Solicite en el pedido	«Parte abdominal maxi»

Escudete estrecho hasta la cintura por detrás



Para mujeres con nalgas grandes pero abdomen relativamente plano.

A medida

Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
---------	---

Modelo especial

Modelos	mediven elegance, talla IV – VII mediven plus, talla I – III
Solicite en el pedido	«Escudete estrecho hasta la cintura por detrás» También se puede incorporar en los AT / U. Atención: esta opción precisa una costura transversal en el área de la entrepierna anterior.

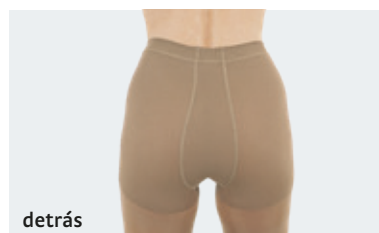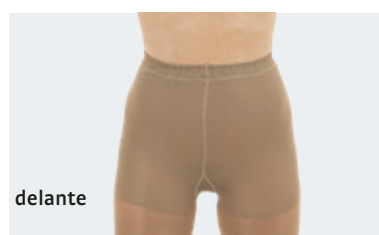

Escudete estrecho hasta la cintura por delante


Para mujeres con abdomen grande pero nalgas relativamente planas.

A medida

Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
---------	---

Modelo especial



Modelos	mediven elegance, talla I – III mediven plus, talla I – VII
Solicite en el pedido	«Escudete estrecho hasta la cintura por delante»

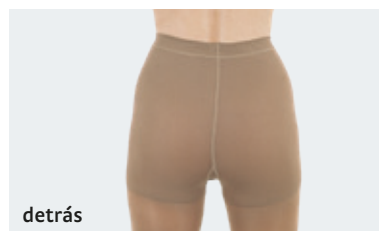

Escudete ancho hasta la cintura por detrás

Para mujeres con unas nalgas mucho más pronunciadas y, por el contrario, un abdomen plano.


A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte, mediven comfort
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven comfort
Solicite en el pedido	«Escudete ancho hasta la cintura por detrás» También se puede incorporar en los AT / U. Atención: esta opción precisa una costura transversal en el área de la entrepierna anterior.

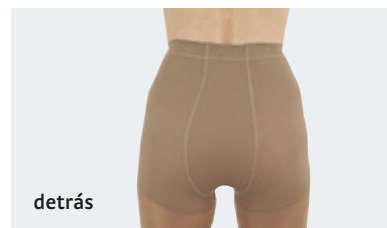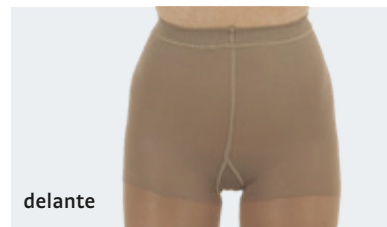

Escudete ancho hasta la cintura por delante

Para mujeres con abdomen pronunciado y nalgas relativamente planas.



A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte, mediven comfort
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven comfort
Solicite en el pedido	«Escudete ancho hasta la cintura por delante»

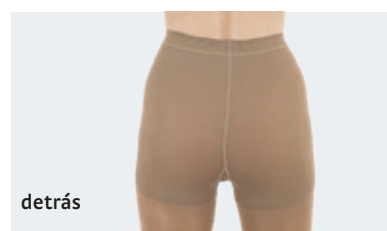

Escudete variable, detrás

Para mujeres con una cintura estrecha, nalgas mucho más pronunciadas y, por el contrario, un abdomen plano.


A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus
Solicite en el pedido	«Escudete variable, detrás»

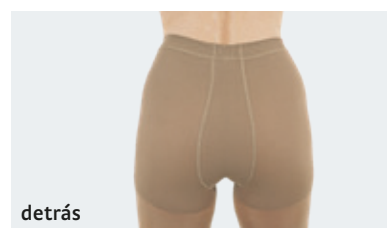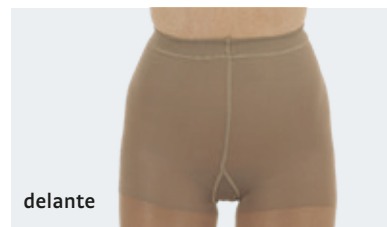

Escudete variable, delante

Para mujeres con una cintura estrecha, abdomen mucho más pronunciado y, por el contrario, nalgas planas.



A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus
Solicite en el pedido	«Escudete variable, delante»

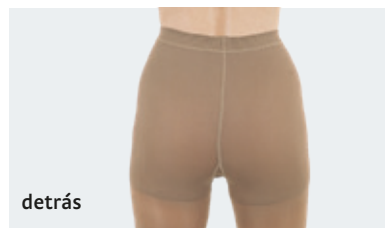

Escudete continuo, estrecho

Para mujeres sensibles a la presión con unas nalgas y abdomen ligeramente más grandes.

A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus
Solicite en el pedido	«Escudete continuo, estrecho»

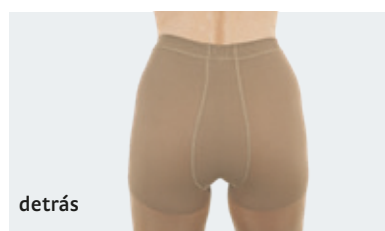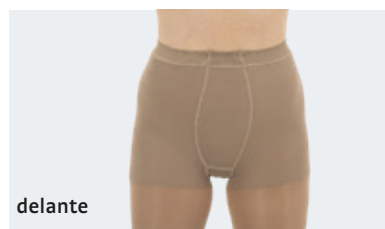

Escudete continuo, estrecho por delante, ancho por detrás

Para mujeres con abdomen grande y nalgas especialmente pronunciadas.



A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus
Solicite en el pedido	«Escudete continuo, estrecho por delante, ancho por detrás»



Escudete continuo, ancho por delante, estrecho por detrás

Para mujeres con una gran circunferencia abdominal y nalgas especialmente pronunciadas.



A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus
Solicite en el pedido	«Escudete continuo, ancho por delante, estrecho por detrás»

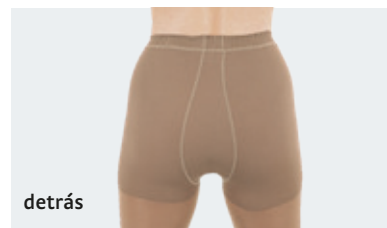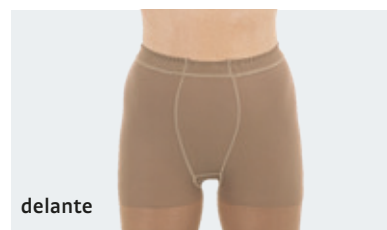

Escudete continuo, ancho

Para mujeres con abdomen y caderas grandes.

A medida	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven forte, mediven comfort
Modelo especial	
Modelos	mediven elegance, mediven plus, mediven comfort
Solicite en el pedido	«Escudete continuo, ancho»

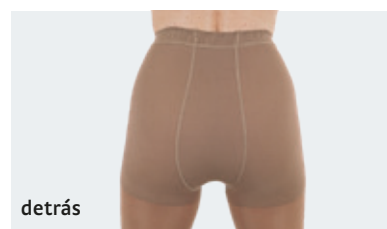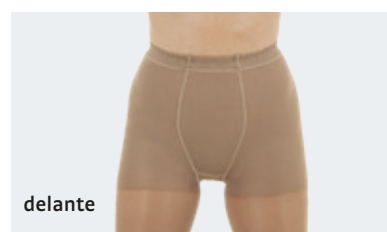

Panty para embarazadas AT / U, cerrado

Escudete estándar

Para embarazadas con una gran circunferencia abdominal en crecimiento.

Modelo estándar

Modelos mediven elegance, mediven plus


Tallas I – VII

A medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Solicite en el pedido «Panty para embarazadas AT / U, cerrado»
El AT / U puede utilizarse con un escudete estrecho (n.º 4) o ancho (n.º 6) hasta la cintura por detrás.

Atención: en este caso se precisa una costura transversal en el área del escudete anterior.

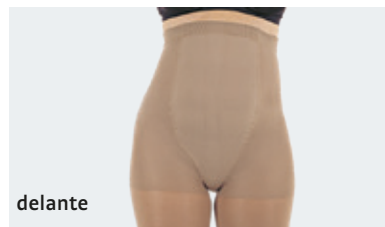

delante



lado

Panty para embarazadas AT / U, abierto

Para embarazadas con una gran circunferencia abdominal en crecimiento y sensibilidad a la presión.


A medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Modelo especial

Modelos mediven elegance, mediven plus

Solicite en el pedido «Panty para embarazadas AT / U, abierto»

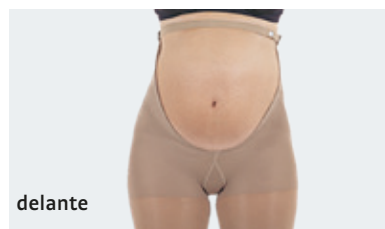

delante



lado

Escudete para hombre con bragueta vertical / horizontal

Para hombre, con bragueta.

Modelo estándar

Modelos mediven plus (bragueta horizontal estándar)

Tallas I – VII


A medida

Modelos mediven plus, mediven forte

Solicite en el pedido «Entropierna de hombre con bragueta horizontal» o
«Entropierna de hombre con bragueta vertical»



delante

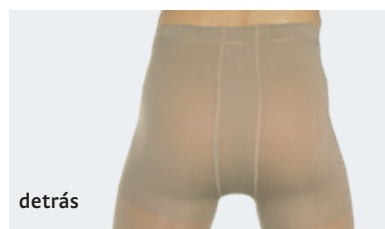

detrás

mediven[®] ulcer kit

La terapia para úlceras en la pierna requiere un concepto de terapia sofisticado. Con mediven ulcer kit, los pacientes con úlcera en la pierna pueden recibir un tratamiento efectivo. El ulcer kit consta de dos componentes, que se ponen uno encima de otro: mediven ulcer y mediven ulcer plus. Tanto la media interior como la exterior proporcionan 20 mmHg, por lo que permiten una compresión con eficacia terapéutica de día y de noche.





mediven
ulcer kit

mediven® ulcer kit

Sistema de medias para úlceras con 2 x 20 mmHg que ofrece una terapia de compresión eficaz hasta 24 horas al día.^{1,2}

Consejo de medi*:

De acuerdo con las características del producto, recomendamos mediven ulcer kit para:

- Mujeres / hombres
- Tras la descongestión del edema inicial
- Aptas para terapia de compresión de 24 horas

Indicaciones²

- Terapia de úlcera venosa en la pierna (clasificación CEAP C6)
- Terapia de úlceras mixtas (por problemas arteriales y venosos), teniendo en cuenta las contraindicaciones
- Prevención de recurrencia de úlcera venosa en la pierna (clasificación CEAP C5)

Características

- Ofrece una terapia eficaz durante la noche^{1,2}
- Fácil colocación: el material de la media interior facilita la colocación de la media exterior³
- Efecto inhibidor del olor
- Aspecto elegante
- Comodidad de uso con una buena durabilidad
- Cumple los requisitos EWMA** sobre presión terapéutica necesaria (40 mmHg)⁴
- Alta estabilidad gracias a la doble capa

Instrucciones para el lavado

Media interior: j    

Media exterior: g    

Prenda apta para lavadora y secadora.



Nota

Para obtener información y vídeos sobre su colocación, visite: medi.biz/ulcerkit

* Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye el diagnóstico de un médico ni el asesoramiento profesional de un distribuidor minorista especializado en productos médicos
1 Partsch H et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. *Phlebology* 2008;23(1):40-46.
2 Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. *Phlebologie* 2011;5:245-250.
3 Tickle J. Managing venous leg ulcers and oedema using compression hosiery. *Nursing Standard* 2015;30(8):57-63.
4 Franks P et al. Management of Patients with Venous Leg Ulcer Challenges and Current Best Practice, *J Wound Care* 2016;25 Suppl 6:1-67. ** European Wound Management Association

Media interior mediven® ulcer

NUEVO

Compresión con eficacia terapéutica de 20 mmHg durante la noche.^{1,2}

La banda plana queda fija sin contraerse

Material suave con efecto antibacteriano para que resulte cómodo de llevar y fácil de colocar.

La zona del empeine cosida ofrece un ajuste óptimo y reduce las arrugas al flexionar el pie

El diseño especial del talón ofrece un alivio de presión óptimo y una marca de color para colocarlo fácilmente

Media exterior mediven® ulcer plus

Compresión adicional de 20 mmHg durante el día.

La banda ancha garantiza una comodidad óptima

Material de elasticidad media que ofrece una presión de trabajo eficaz pero cómoda

Cómodo talón plus y planta del pie reforzada para una buena durabilidad

También disponible con puntera cerrada



mediven[®] ulcer kit

Sistema de medias para úlceras con 2 x 20 mmHg que ofrece una terapia de compresión eficaz hasta 24 horas al día.^{1,2}

Contenido de la entrega

- 2 medias interiores mediven ulcer
- 1 media exterior mediven ulcer plus
- 1 esarpín de ayuda para la colocación (artículo estándar para el mediven ulcer kit con puntera abierta)

Compresión

2 x 20 mmHg

Ventajas del producto



Softness*



Easy donning



Clima Fresh



* Estas características se aplican únicamente a mediven ulcer

mediven ulcer kit

	AD	AD
	Puntera cerrada	Puntera abierta
Serie 2 x 20 mmHg	17.06.08.1004	17.06.08.1004

Artículo	N.º de artículo	
puntera cerrada	pequeño	regular
mediven ulcer kit	381708Δ000	381008Δ000
puntera abierta		
mediven ulcer kit	381707Δ000	381007Δ000
refill (2 piezas por paquete)	Lote de recambio	
mediven ulcer Refill	8X4718Δ000	8X4018Δ000

Δ = añadir talla 1 - 7

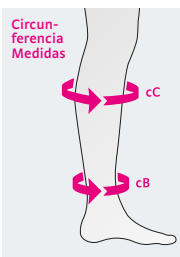


Tabla de medidas/tallas		Talla I	Talla II	Talla III	Talla IV	Talla V	Talla VI	Talla VII
Medidas de pierna (en cm)	Tobillo cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	30 - 32
	Debajo de la rodilla cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48	40 - 50
Marca de color	Talón	rosa	azul	amarillo	rojo	gris	verde	marrón
Longitud (en cm)		corta		regular				
ID		34 - 38		39 - 44				





mediven harmony[®]

Esta cómoda manga «sin costuras» es adecuada para edemas leves postraumáticos.



mediven
harmony:

mediven harmony®

Manga cómoda de tejido circular.

Indicaciones

- Trombosis venosa en el hombro
- Recomendación de medi:
Edema posoperatorio y postraumático (atención: ¡no adecuada para edemas pronunciados!)


Pieza de mano:

- Contrarresta la formación de edemas en la zona de la mano mientras se usa una media de compresión para el brazo

Características

- Las elipses dobles en el hueso del codo y en el pliegue del codo ofrecen libertad de movimiento. Así se reducen las arrugas al mínimo para prevenir dolores.
- La forma anatómica de la manga garantiza una colocación y una retirada correctas
- La banda de silicona está tejida a la manga con una costura plana e imperceptible que garantiza la sujeción sin perder la permeabilidad al aire.
- Resulta cómoda para la piel en cualquier estación del año gracias a Clima Comfort
- Acabado de lanolina para cuidar y proteger la piel²

Pieza de mano

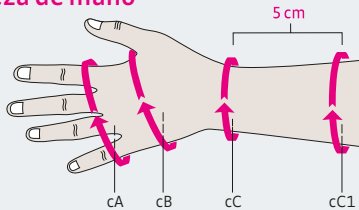

Variables disponibles

Pieza de mano AC1 sin dedos, con pieza para pulgar



sin dedos
CCL 1: N.º de artículo:
2Y90x02-7000
CCL 2: N.º de artículo:
2Y90x02-7000

Guante AC1 sin costuras con dedos de compresión



con dedos
CCL 1: N.º de artículo:
2Z90x02-7000
CCL 2: N.º de artículo:
2Z91x02-7000

Composición del material de la pieza de mano

	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	18 %	82 %
CCL 2	22 %	78 %




Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo Prenda apta para lavadora y secadora

Contorno / Pieza de mano (cm)

Tallas	II	III	IV	V	VI	VII
cC1*	15,0-18,0	17,0-20,0	19,0-21,5	21,0-23,5	23,0-26,0	25,5-30,0
cC	13,5-15,5	15,0-18,0	17,0-20,0	19,0-21,0	20,0-23,5	22,5-27,5
cB	15,5-20,0	17,5-21,0	19,5-23,0	20,5-24,0	22,5-26,0	24,5-30,0
cA	15,0-19,0	17,0-20,0	19,0-22,0	20,0-23,0	22,0-25,0	24,0-29,0

Consejo de medi:

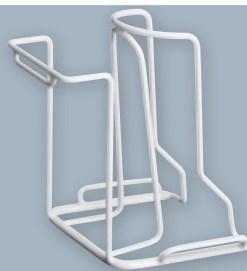

medi Butler, para ponerse las medias con facilidad¹



Productos para el cuidado de la piel y el tejido medi

Encontrará más información sobre los accesorios medi a partir de la página 110

* Punto de medida cC1 situado 5 cm por encima de cC

¹ En general se aplica lo siguiente a las ayudas para la colocación y la retirada de las medias: Rabe E et al. Directriz S2k: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). (Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión médicas (MCS), Vendaje de compresión flebológico (PCB) y Sistemas de compresión adaptativos médicos (MAC)). Publicado online en: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (último acceso: 02/03/2020)

² Sustancia natural que se emplea para el tratamiento de pieles secas y agrietadas, con muchos tipos de aplicaciones; por ejemplo, en el cuidado de niños y bebés. El tratamiento nutritivo protector sigue siendo efectivo tras el lavado.

Ventajas del producto



Clima Comfort



Perfect Fit



Double elipses

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
96.0.1369/1 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe,
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
97.0.3231 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe,
www.oeko-tex.com/standard100

Clase de compresión


CCL 1, 2

Colores estándar

S = Estándar

Caramelo
S

Manga

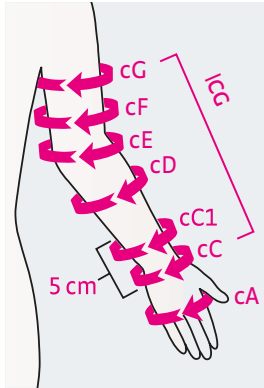

Puntos de medida de mediven harmony

Longitud corta

Estilos estándar

Colores	caramelo
Tallas estándar	I – VII, Estándar y extraancho
A medida	no es posible
Borde	Banda de puntos de silicona, estrecha, 2,5 cm
Pieza de mano	Sin dedos, con pieza de pulgar

Composición del material

Tratamiento del brazo	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	34 %	66 %
CCL 2	43 %	57 %



Longitud (cm)

Longitud estándar	41 - 47
Longitud estándar	36 - 40

Versiones (todas las versiones disponibles en estándar y extraancho)

Manga AG con pieza de mano integrada y banda de silicona

Manga CG con banda de silicona

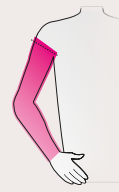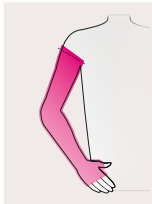

Manga	Talla I		Talla II		Talla I – III		Talla IV	
Circunferencia (cm)	Estándar	Extraancho	Estándar	Extraancho	Estándar	Extraancho	Estándar	Extraancho
cG	25,5 – 28,0	28,5 – 31,0	28,0 – 30,5	30,5 – 33,5	30,0 – 33,0	33,0 – 36,0	32,0 – 35,0	35,0 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	29,5 – 32,0	32,0 – 35,0
cE	23,0 – 25,0	24,0 – 26,0	24,5 – 26,5	26,5 – 29,0	26,0 – 28,5	28,5 – 31,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0
cD	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,5	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	25,0 – 27,5	28,0 – 30,5
cC1 = 100 %*	15,0 – 16,5		16,5 – 18,0		18,0 – 19,5		19,5 – 21,0	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16,0 – 17,5		17,5 – 19,0	
cA	15,0 – 18,0		16,0 – 19,0		17,0 – 20,0		19,0 – 22,0	
Manga	Talla V		Talla VI		Talla VII			
Circunferencia (cm)	Estándar	Extraancho	Estándar	Extraancho	Estándar	Extraancho	Estándar	Extraancho
cG	33,5 – 36,5	37,0 – 40,5	36,0 – 39,5	39,5 – 43,0	38,0 – 41,5	41,5 – 45,5		
cF	31,0 – 34,0	34,0 – 37,0	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0		
cE	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0		
cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,0	28,5 – 31,0	31,0 – 34,0	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5		
cC1 = 100 %*	21,0 – 23,0		23,0 – 25,0		25,0 – 27,5			
cC	19,0 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5			
cA	20,0 – 23,0		22,0 – 25,0		24,0 – 27,0			

* Punto de medida cC1 situado 5 cm por encima de cC





Compresión ajustable circaid®

Prendas de compresión ajustables para el tratamiento de enfermedades venosas.

Las prendas circaid son una solución de compresión para aquellos pacientes que tienen dificultades con las medias de compresión médica corrientes. Su facilidad de colocación y retirada favorece la gestión autónoma y, de esta forma, un mayor cumplimiento por parte del paciente y una mejor calidad de vida. La capacidad de reajuste instantáneo del sistema circaid ayuda a aplicar una compresión uniforme en la extremidad y evita que la prenda se deslice hacia abajo, con lo que se logran mejores resultados en el tratamiento y pacientes más satisfechos.



Terapia de compresión por un especialista

medi ofrece la gama más exhaustiva de prendas de compresión para cada necesidad individual.

La gama no elástica circaid es la alternativa rentable a los sistemas de vendaje de elasticidad corta y multicapa. Los productos circaid garantizan un nivel de compresión constante e incorporan un sistema de colocación y retirada rápido y sencillo. La capacidad de reajustar al instante el sistema circaid ayuda a aplicar una compresión uniforme a una extremidad que reduce volumen. Esta opción no es posible con los vendajes sin retirar completamente todas las capas. Las prendas circaid favorecen la gestión autónoma y, de esta forma, un mayor cumplimiento por parte del paciente y una mejor calidad de vida.



Inspiradas en la naturaleza.

Los productos circaid tienen un referente en el mundo animal: la jirafa y su particular estructura cutánea. Las jirafas tienen presiones venosas de más de 250 mmHg en las patas delanteras y traseras, el triple que los humanos. Sin embargo, no padecen linfedemas ni enfermedades venosas, aunque se pasen todo el día de pie, e incluso duerman de pie. ¿Por qué? A diferencia de los humanos, las jirafas tienen una piel no elástica, es decir, que no se estira.* El inventor de circaid se inspiró en esta «compresión natural» y diseñó así su primera prenda no elástica circaid patentada para la pierna. Esta primera prenda se ha seguido desarrollando hasta llegar a los actuales productos circaid (del inglés «circulation aid», ayuda para la circulación).

* Sathar F, Ludo Badlangana N, Manger PR. Variations in the thickness and composition of the skin of the giraffe. *Anatomical record* 2010;293(9):1615-1627.

Características de circaid®

Resumen de las características de circaid.



Sistema Built-In-Pressure®

Ajuste, control y reajuste del rango de compresión terapéutica correcta



Breathe-O-Prene

- Material transpirable y sin látex
- Inhibición de olores con efecto antibacteriano




Sistema de bandas yuxtapuestas

- Ajuste óptimo gracias al intercalado de bandas
- Cada tira se puede reajustar ya colocada en la extremidad



Variedad

- Extensa gama de opciones de tratamiento
- Muchas tallas disponibles

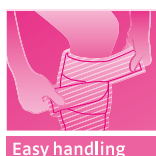

Fácil manejo

- Colocación y retirada sencillas
- Facilita el manejo al paciente



No elástica

- Material no elástico para lograr una terapia eficaz y comodidad de uso
- Inspiradas en la naturaleza



Todos los productos circaid están fabricados sin látex.



circaid® Built-In-Pressure System (BPS)

Las prendas de compresión no elásticas circaid han sido diseñadas de modo que se puedan ajustar conforme a rangos de compresión precisos con un perfil de compresión graduado, desde el tobillo hasta la pierna.

El diseño sencillo para el usuario del circaid Built-In-Pressure System (BPS) permite que los pacientes dispongan de los rangos de compresión necesarios para el tratamiento y los cuidados de las enfermedades venosas crónicas.

Con el folleto guía de circaid Built-In-Pressure System (BPS) los pacientes pueden ajustar el rango de compresión que tienen prescrito al colocar la prenda y reajustar el rango de compresión durante el día según lo necesiten. De esta forma se garantiza el rango de compresión adecuado en todo el periodo durante el que se use la prenda. Al mismo tiempo, revisar si el rango de presión aplicado es correcto resulta muy sencillo.



2
Fase

3
Fase



circaid® juxtalite®

Prenda de compresión ajustable para el tratamiento de enfermedades venosas tras la descongestión inicial del edema.

Consejo de medi*:

De acuerdo con las características del producto, recomendamos circaid juxtalite para:

- Mujeres/hombres
- Pacientes que tienen problemas con las medias de compresión médica
- Terapia de compresión de 24 horas
- Pacientes móviles / inmóviles

Indicaciones

- Insuficiencia venosa crónica
- Venas varicosas
- Síndrome postrombótico
- Úlcera por estasis venosa
- Tras escleroterapia
- Edema dependiente

Características del producto

- Fácil manejo: colocación y retirada sencillas
- circaid Built-In-Pressure System (BPS): compresión ajustable, controlable y reajutable
- Breathe-O-Prene: material transpirable con una alta presión de trabajo
- Material sin látex, inhibidor de olores con efecto antibacteriano
- La posibilidad de reajustar las bandas individuales evita que se pierda presión y, por tanto, que se deslice la prenda hacia abajo^{1,2}
- Nuevo: Ahora también disponible con calcetín interior de compresión
 - Aplica una compresión gradual en el pie y el tobillo
 - La compresión gradual continúa hasta la parte de la pierna del calcetín interior

Ventajas

- Ofrece un concepto de terapia alternativo para pacientes que no pueden utilizar o no toleran los calcetines de compresión para úlceras
- Tasas de curación más rápidas de las úlceras venosas en las piernas^{1,2}
- Aumenta la posibilidad de autogestión gracias al manejo sencillo¹


Rangos de compresión ajustables

20 – 30 mmHg

30 – 40 mmHg

40 – 50 mmHg

Ventajas del producto

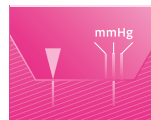

Built-In-Pressure



Breathe-O-Prene



Juxtaposed band



Variety



Easy handling



Inelastic

Color disponible

S = Estándar

Beige
S

Nota

* Tenga en cuenta que esta recomendación no sustituye al diagnóstico ni la consulta a un profesional médico.

Estudios

¹ Mosti G et al. Adjustable compression wrap devices are cheaper and more effective than inelastic Bandages for venous leg ulcer healing. A Multicentric Italian Randomized Clinical Experience. *Phlebology* 2020;35(2):124-133.

² Stather PW et al. Review of adjustable velcro wrap devices for venous ulceration. *In Wound J* 2019;16(4):903-908.

circaid® juxtalite®

Prenda de compresión ajustable para enfermedades venosas.

Su pedido incluye

- 1 prenda de compresión ajustable no elástica
- 1 folleto guía de circaid Built-In-Pressure System (BPS)
- 1 par de tobilleras de compresión circaid
- circaid funda de protección parte inferior de la pierna



circaid juxtalite



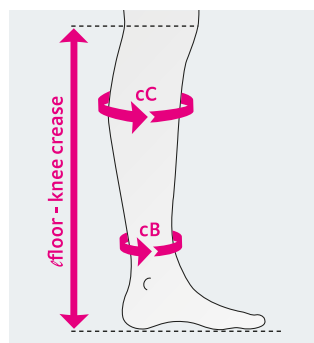
circaid juxtalite			
Estilos		AD	AD
			
		corta	larga
Talla / n.º de artículo	S	JU15702000	JU15002000
	M	JU15703000	JU15003000
	L	JU15704000	JU15004000
	XL	JU15705000	JU15005000
	XXL	JU15706000	JU15006000
	M extraan-cha	JU15713000	JU15013000
	L extraan-cha	JU15714000	JU15014000
	XL extraan-cha	JU15715000	JU15015000

Tabla de medidas de circaid® juxtalite®

Contornos en cm				
	S	M	M - X	L
cC	26 - 36	33 - 44	44 - 54	41 - 51
cB	19 - 22	22 - 27	22 - 27	25 - 32
	L - X	XL	XL - X	XXL
cC	51 - 61	37 - 48	48 - 61	53 - 64
cB	25 - 32	30 - 37	30 - 37	35 - 42
Tallaje en cm	corta	larga		
∠ suelo - pliegue de la rodilla	< 44	> 44		

Todas las prendas incluyen el Built-In-Pressure system (BPS).



circaid® juxtalite® con calcetín interior de compresión circaid®

Su pedido incluye

- 1 prenda de compresión ajustable no elástica
- 1 folleto guía de circaid Built-In-Pressure System (BPS)
- 1 par de calcetines interiores de compresión moderada, circaid




circaid juxtalite con calcetín interior de compresión circaid

NOVEDAD: circaid juxtalite con calcetín interior de compresión			
Estilos		AD	AD
			
		corta	larga
Talla / n.º de artículo	S	JU1M702000	JU1M002000
	M	JU1M703000	JU1M003000
	L	JU1M704000	JU1M004000
	XL	JU1M705000	JU1M005000
	XXL	JU1M706000	JU1M006000
	M extraancha	JU1M713000	JU1M013000
	L extraancha	JU1M714000	JU1M014000
	XL extraancha	JU1M715000	JU1M015000

Tabla de medidas de circaid® juxtalite®

Contornos en cm				
	S	M	M - X	L
cC	26 - 36	33 - 44	44 - 54	41 - 51
cB	19 - 22	22 - 27	22 - 27	25 - 32
	L - X	XL	XL - X	XXL
cC	51 - 61	37 - 48	48 - 61	53 - 64
cB	25 - 32	30 - 37	30 - 37	35 - 42
Tallaje en cm	corta	larga		
∠ suelo - pliegue de la rodilla	< 44	> 44		

Todas las prendas incluyen el Built-In-Pressure system (BPS).

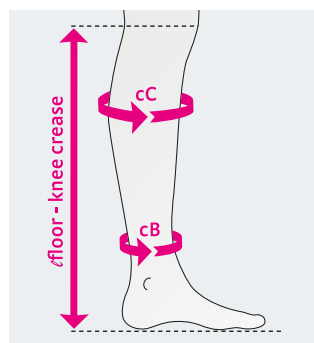



circaid® juxtalite® hd

Dispositivo de compresión ajustable más robusto: material más grueso ideal para el tratamiento después de la descongestión inicial de moderada a severa edema.

consejo medi*:

Debido a las características del producto, recomendamos circaid juxtalite hd para:

- Mujeres/ Hombres
- Tendencia de moderada a grave al fleboedema
- Pacientes que tienen problemas con las medias de compresión médica
- Hasta 24 horas de terapia de compresión

Indicaciones

- Insuficiencia venosa crónica
- Venas varicosas
- Síndrome postrombótico
- Úlcera por estasis venosa / Úlcera mixta en la pierna
- Post escleroterapia
- Edema dependiente

Características del productos

- Material más grueso y resistente: para fleboedema de moderado a grave
- Nuevo diseño de banda para un ajuste mejorado, evitando arrugas y previniendo edemas de ventana eventuales
- Manejo sencillo: fácil de poner y quitar
- Sistema de presión incorporado (BPS) circaid: compresión ajustable, medible y reajutable
- El reajuste de las bandas individuales evita la pérdida de presión y, por lo tanto, el deslizamiento de la prenda^{1,2}
- Breathe-O-Prene: material transpirable con alta presión de trabajo
- Material inhibidor de olores sin látex con efecto antibacteriano
- Viene con calcetín compresivo moderado
 - Aplica compresión graduada al pie y al tobillo
 - La compresión graduada continúa en la parte de la pierna del calcetín

Beneficios

- Fácil manejo: ahorra tiempo y es menos susceptible a errores³
- Ahorro de costos debido a tasas de curación más rápidas¹
- Aumento de la concordancia del paciente: el 94,6 % de los usuarios experimentan la comodidad de uso como agradable³
- Mayor movilidad: posibilidad de llevar calzado normal
- Favorece la autogestión gracias a su fácil manejo¹

Adjustable compression

20 – 30 mmHg
30 – 40 mmHg
40 – 50 mmHg

Product benefits



Built-In-Pressure®



Variety



Juxtaposed band



Easy handling



Inelastic



Breathe-O-Prene



Colores disponibles

Beige
S

S = Standard

Nota

Para más información y videos por favor visita: [medi.biz/jl](https://www.medi.biz/jl)

* Please consider, that this recommendation does not replace the diagnosis and consultation of a medical healthcare professional.

Estudios

¹Mosti G et al. Adjustable compression wrap devices are cheaper and more effective than inelastic bandages for venous leg ulcer healing. A Multicentric Italian Randomized Clinical Experience. Phlebology 2020;35(2):124-133.

²Stather PW et al. Review of adjustable velcro wrap devices for venous ulceration. In Wound J 2019;16(4):903-908.

³Protz K et al. Comparison of handling, pressure and wearing comfort of different compression edvices for decongestion therapy. Veins and Lymphatics 2018;7:7989:137-138.

circaid® juxtalite® hd

Tu pedido incluye:


- 1 prenda de compresion ajustable no elastica
- 1 folleto guia de circaid Built-In-Pressure System (BPS)
- 1 par de tobilleras de compr



circaid juxtalite hd

Talla / n.º de artículo		corta	larga
S	JU1H702000	JU1H002000	JU1H002000
M	JU1H703000	JU1H003000	JU1H003000
M-X	JU1H713000	JU1H013000	JU1H013000
L	JU1H704000	JU1H004000	JU1H004000
L-X	JU1H714000	JU1H014000	JU1H014000
XL	JU1H705000	JU1H005000	JU1H005000
XL-X	JU1H715000	JU1H015000	JU1H015000
XXL	JU1H706000	JU1H006000	JU1H006000

Tabla de medidas

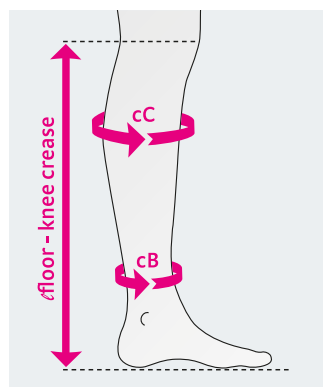

Contornos en cm	S	M	M - X	L
cC	26 - 36	33 - 44	44 - 54	41 - 51
cB	19 - 22	22 - 27	22 - 27	25 - 32
	L - X	XL	XL - X	XXL
cC	51 - 61	37 - 48	48 - 61	53 - 64
cB	25 - 32	30 - 37	30 - 37	35 - 42
Tallaje en cm	corta		larga	
∠suelo - pliegue de la rodilla	< 44		> 44	



Opciones de circaid® para el pie

Se recomienda usar las siguientes opciones para el pie en combinación con circaid juxtalite.

Nota

Se recomienda llevar siempre una opción circaid para el pie en combinación con una prenda circaid para la pierna. Las indicaciones de las opciones de circaid para el pie son idénticas a las de la prenda circaid correspondiente para la pierna. Deberá realizar el pedido por separado.

Bandas envolventes para pie y tobillo circaid® juxtalite®

Dispositivo de compresión ajustable con talón cerrado para enfermedades venosas.

Detalles del producto


- Ofrece compresión para el pie y el tobillo
- Se puede recortar la longitud para lograr un ajuste perfecto
- Fácil manejo
- Disponible solo en tallas estándar

Tabla de medidas

Circunferencias en cm		
	S	M
cA1	19 – 26	24 – 31
N.º de artículo	JU1W002000	JU1W003000



Bandas envolventes para pie y tobillo circaid juxtalite

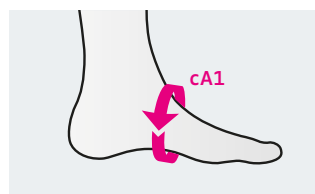

Tobillera de compresión circaid®

Opción de compresión estándar para el pie y el tobillo.

Detalles del producto


- Ofrece compresión para el pie y el tobillo
- Se puede combinar con otras opciones de circaid para el pie
- Disponible en talla estándar y grande

Tabla de medidas

Circunferencias en cm		
	Estándar	Grande
cB	19 – 27	25 – 50
cA1	19 – 36	22 – 41
N.º de artículo	JU51001000	JU51002000



Tobillera de compresión circaid

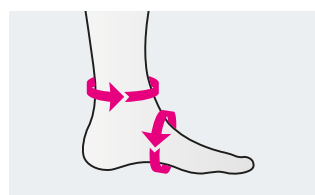

Banda de compresión con potencia adicional circaid® (pac band)

Compresión adicional para el arco del pie y el tobillo.

Detalles del producto


- Compresión adicional para el pie con tendencia leve a grave al edema
- Dirige el efecto al arco del pie y alrededor de los maléolos
- Se puede recortar para adaptarse a casi cualquier forma de pie
- Fácil manejo
- Material ligero y transpirable
- Disponible en talla estándar y grande
- Uso bilateral (pie izquierdo o derecho)

Tabla de medidas

Circunferencias en cm			
	Estándar	Grande	Extra larga
cB	19 – 27	25 – 50	45 – 56
cA1	19 – 36	22 – 41	22 – 41
N.º de artículo	JU5P001	JU5P002	JU5P003000



Banda de compresión con potencia adicional circaid (pac band)

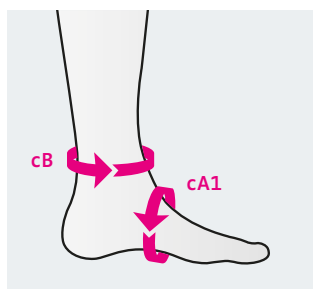

Calcetín interior de compresión circaid®

Forro fácil de colocar con compresión para el pie y el tobillo.

Detalles del producto


- Aplica una compresión gradual al pie y el tobillo
- La compresión gradual continúa hasta la parte de la pierna del calcetín interior
- Material suave que ofrece comodidad de uso
- Disponible en 15 - 25 mmHg (compresión moderada) y 25 - 35 mmHg (compresión firme)
- Disponible en talla estándar y grande

Tabla de medidas

Circunferencias en cm		
	Estándar	Grande
cA1	19 – 32	24 – 41
cB	19 – 27	25 – 42
cC	26 – 54	41 – 64
N.º de artículo		
Moderada	JU5M001 000	JU5M002 000
Firme	JU5F001 000	JU5F001 000



Calcetín interior de compresión circaid

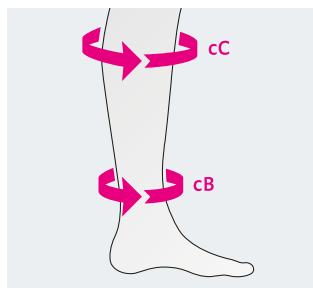





Medias de viaje medi travel®

Las personas con un sistema venoso sano no suelen pensar inmediatamente en la profilaxis de la trombosis cuando viajan por placer o negocios. Sin embargo, esto es particularmente importante en trayectos prolongados por carretera o en vuelos. Los calcetines de viaje son un elemento esencial en cualquier equipaje. Pueden reducir el riesgo de trombosis del viajero.¹

En sus charlas con los clientes, incluya el tema de la profilaxis de la trombosis a la hora de viajar y recomiende los calcetines de viaje medi, el compañero de viaje más saludable para unas piernas sanas y en forma.

¹ Hsieh HF, Lee FP. Graduated compression stockings as prophylaxis for flight-related venous thrombosis: systematic literature review. *J Adv Nurs* 2005;51(1):83-98.

medi travel[®] men

Los calcetines de viaje deportivos para ÉL.

Características

- Media hasta la rodilla opaca con un atractivo aspecto acanalado
- Distribución de la presión decreciente hacia arriba controlada
- Pueden reducir el riesgo de trombosis del viajero¹
- Material extrasuave con suela reforzada
- Puño cómodo
- Clima Comfort: para la eliminación rápida de la humedad de la superficie de la piel y una elevada transpirabilidad
- Para personas con un sistema venoso sano
- Producto de venta libre

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo     

Prenda apta para lavadora y secadora

Estilos		Tabla de medidas	
AD			
		<p>Circunferencia</p> <p>18 – 20 cm S</p> <p>20 – 23 cm M</p> <p>23 – 26 cm L</p> <p>26 – 29 cm XL</p> <p>29 – 32 cm XXL</p>	
Longitud estándar y corta	La longitud se mide desde el talón hasta debajo de la rodilla.	Circunferencia del tobillo	Para determinar la talla correcta de medi travel se mide la circunferencia del tobillo.

Estilos estándar	
Pie	puntera cerrada, talla de calzado 38 – 48
Series	Talla S – XXL, Longitud estándar (43 – 49 cm) y corta (37 – 42 cm)

Composición del material	
Elastano (EL)	Poliamida (PA)
10 %	90 %

Ventajas del producto



Clima Comfort



Perfect Fit



Fibras de última tecnología

Máxima elasticidad longitudinal y transversal que garantiza un confort óptimo para el usuario en la pierna



medi travel cumple con todas las directivas de la UE aplicables. Se han completado todos los procedimientos de evaluación de la conformidad prescritos.

Colores

S = Estándar

Negro
S

Antracita
S



¹ Hsieh HF, Lee FP. Graduated compression stockings as prophylaxis for flight-related venous thrombosis: systematic literature review. J Adv Nurs 2005;51(1):83-98.

medi travel® women

Los calcetines de viaje deportivos para ELLA.




Características

- Calcetines hasta la rodilla con aspecto semitransparente
- Distribución de la presión decreciente hacia arriba controlada
- Pueden reducir el riesgo de trombosis del viajero¹
- Puño cómodo
- Clima Comfort: para la eliminación rápida de la humedad de la superficie de la piel y una elevada transpirabilidad
- Clima Fresh: efecto inhibidor del olor
- Para personas con un sistema venoso sano
- Producto de venta libre

Instrucciones para el lavado

Cuidado sencillo    

Prenda apta para lavadora y secadora

Estilos		Tabla de medidas	
AD			
		<p>Circunferencia</p> <p>18 – 20 cm S 20 – 23 cm M 23 – 26 cm L 26 – 29 cm XL 29 – 32 cm XXL</p> <p>Circunferencia del tobillo</p>	
Longitud estándar y corta	La longitud se mide desde el talón hasta debajo de la rodilla.	Para determinar la talla correcta de medi travel se mide la circunferencia del tobillo.	
Estilos estándar			
Pie	puntera cerrada, talla de calzado 36 – 43		
Series	Talla S – XXL, Longitud estándar (39 – 44 cm) y corta (34 – 38 cm)		
Composición del material			
Elastano (EL)	Poliamida (PA)		
25 %	75 %		

Ventajas del producto



Fibras de última tecnología
Máxima elasticidad longitudinal y transversal que garantiza un confort óptimo para el usuario en la pierna



CE medi travel cumple con todas las directivas de la UE aplicables. Se han completado todos los procedimientos de evaluación de la conformidad prescritos.

Colores

S = Estándar

Negro
S

Caramelo
S



¹ Hsieh HF, Lee FP. Graduated compression stockings as prophylaxis for flight-related venous thrombosis: systematic literature review. J Adv Nurs 2005;51(1):83-98.





Accesorios medi

medi ofrece medias de compresión médica para el ámbito del tejido circular y plano, así como productos complementarios. La piel, en particular, precisa de un cuidado especial cuando hablamos de terapia de compresión. ¿Sus clientes se quejan de picores o piel seca? Recomiende los productos para el cuidado de medi. Se han diseñado especialmente para pacientes de enfermedades venosas y edemas, y miman la piel gracias a sus excepcionales características.

Los productos para el cuidado de medias de compresión protegen el tejido y garantizan una larga vida útil de las medias, además de cuidar la piel.

¿Sus pacientes necesitan ayuda para ponerse las medias de compresión médica? Existen distintos medios de ayuda para colocar y retirar las medias de compresión que facilitan enormemente su uso diario.

Cuidado de la piel medi

Ofrezca más a sus clientes; por ejemplo, una piel sedosa durante el tratamiento de compresión.


Los productos para el cuidado de la piel de medi incorporan muchos componentes beneficiosos. Son el acompañamiento perfecto para un tratamiento venoso y garantizan una piel nutrida y saludable.

Las medias de compresión médica son el principal componente de un tratamiento venoso. Un cuidado adecuado de la piel es también una parte importante del tratamiento, dado que las prendas suelen usarse durante todo el día. Como consecuencia, la piel puede sufrir. Los productos para el cuidado de la piel de medi se han diseñado especialmente para los tratamientos de compresión y para mantener el equilibrio de la piel.

Un consejo importante para pacientes con alergias:

Todos los productos cumplen con los requisitos más estrictos y están fabricados sin parabenos (conservantes) ni alcoholes de lanolina, y no tienen látex.

Los productos para el cuidado de medi no tienen fecha de consumo preferente ni caducidad. Se marcan con una fecha de apertura del tubo y un mes. Eso significa que, tras abrir el tubo y empezar a usar el contenido, el producto debe consumirse en un plazo de 6, 9 o 12 meses, como ocurre con los geles, champús, etc.

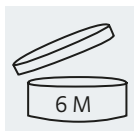

Los productos para el cuidado de medi son productos cosméticos y únicamente deben aplicarse sobre piel sana.

medi day® – gel refrescante con castaño de indias

- Efecto frío y refrescante
- Piel suave y bien nutrida
- Reduce la sensación de opresión
- Favorece la comodidad del usuario de medias de compresión médica

Tubo de 50 ml / Tubo de 150 ml / Dispensador de 500 ml

Artículo	Paquete	N.º de artículo
medi day, tubo de 50 ml	6 uds.	P400025000
medi day, tubo de 150 ml	6 uds.	P400026000
medi day, dispensador de 500 ml	1 ud.	P400027000



Puede consultar más información sobre los ensayos realizados en www.dermatest-garantie.de

medi night – crema para el cuidado de la piel con hamamelis regenerativo

- Para calmar y rejuvenecer la piel durante la noche.
- Alivio para la piel que favorece además el rejuvenecimiento

Tubo de 50 ml / Tubo de 150 ml

Artículo	Paquete	N.º de artículo
medi night, tubo de 50 ml	6 uds.	P500025000
medi night, tubo de 150 ml	6 uds.	P500026000



Puede consultar más información sobre los ensayos realizados en www.dermatest-garantie.de



medi day



medi night

* Puede consultar más información sobre los ensayos realizados en www.dermatest-garantie.de

medi fresh – spray refrescante con mentol

- Un toque de frescor durante todo el día
- Efecto refrescante inmediato
- Se puede usar varias veces al día
- Suave para el tejido de las medias
- Fácil de usar todos los días

Bote de 100 ml

Artículo	Paquete	N.º de artículo
medi fresh, bote de 100 ml	6 uds.	P900026000



Puede consultar más información sobre los ensayos realizados en www.dermatest-garantie.de



medi fresh

medi soft – cuidado para la piel con castaño de indias y urea hidratante

- Espuma suave para el cuidado continuo de la piel
- Piel suave y bien nutrida
- Reduce la sensación de opresión
- Favorece la comodidad del usuario de medias de compresión médica
- Ayuda adicional en el uso de tejidos y bandas de silicona

Bote de 125 ml

Artículo	Paquete	N.º de artículo
medi soft, bote de 125 ml	6 uds.	P800026000



Puede consultar más información sobre los ensayos realizados en www.dermatest-garantie.de



medi soft

Cuidado de tejidos medi

El detergente de lavado a mano especial medi se ha diseñado específicamente para las prendas de compresión mediven. Es adecuado para el lavado diario y limpia el tejido con suavidad y eficacia.

El quitamanchas medi elimina la abrasión provocada por el calzado en el talón y en la punta del pie. Se aplica en las áreas necesarias antes del lavado (dejar actuar durante cinco minutos).



Características

- Protege el color
- Cuidado suave
- Fácil manejo
- Sin olor
- Compatibilidad dermatológica

medi clean – detergente de lavado a mano para prendas de compresión médica

Artículo	Paquete	N.º de artículo
medi clean, 200 ml	6 uds.	P920026000



medi clean

medi spot ex – lápiz quitamanchas

Artículo	Paquete	N.º de artículo
medi spot ex, 15 ml	6 uds.	P930005000



medi spot ex

Red de lavado medi

Artículo	Paquete	N.º de artículo
Red de lavado medi	15 uds.	1020585000



Red de lavado medi

Ayudas medi para la colocación y la retirada de las medias

medi Butler

Ventajas:

- Nueve calzadores: la solución perfecta para todas las necesidades de sus clientes
- Aumento de las ventas complementarias
- Ahorro de tiempo gracias a una colocación y una retirada sencillas

Ventajas para sus clientes:

- Colocación rápida y sencilla de las medias de compresión
- Menor esfuerzo
- Amplia selección para las necesidades más especiales

medi Export Butler con asas largas

La ayuda ideal para todos los usuarios de prendas de compresión, que pueden valerse de una cómoda ayuda para colocarse las medias sin necesidad de asistencia. Las asas largas garantizan la máxima estabilidad al colocarse las medias y pantys de compresión.

La longitud del asa es de 32 cm. La anchura del estribo es de 11 cm.


N.º de artículo	6900041000
-----------------	------------



medi Butler con asas largas

La longitud del asa es de 35 cm. La anchura del estribo es de 11 cm.

N.º de artículo	6900052000
-----------------	------------

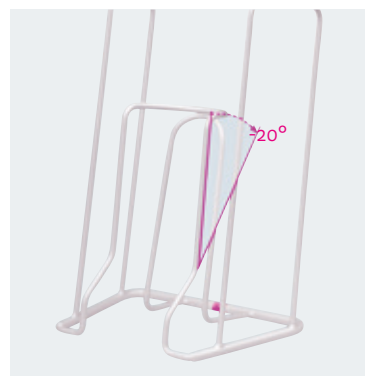


Butler de medi con asas regulables

La ayuda para la colocación de las medias para personas con una notable limitación de movimientos.

El asa se puede ajustar entre 37 y 58 cm.

La anchura del estribo es de 11 cm.

N.º de artículo	6900051000
-----------------	------------

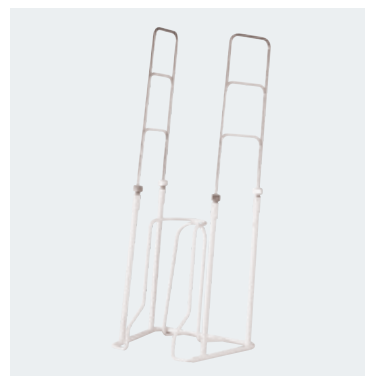

medi Big (XXL) Butler

El estribo del medi Big Butler tiene un diámetro superior. Eso permite circunferencias mayores, que suelen ser necesarias en personas con menor libertad de movimientos. La longitud del asidero es de 44 cm. La anchura del estribo es de 15 cm.

N.º de artículo	6900102000
-----------------	------------



medi Butler para panty

El medi pantyhose Butler facilita la colocación de los pantys de compresión. La longitud del asidero es de 48 cm. La anchura del estribo es de 11 cm.

N.º de artículo	6900055000
-----------------	------------



medi Hospitalbutler

Diámetro ajustable con revestimiento de pintura resistente. La anchura del estribo es de 11cm.

N.º de artículo	6900062000
-----------------	------------



medi Arm Butler

El medi Arm Butler facilita la colocación de las mangas de compresión.

N.º de artículo	6900057000
-----------------	------------



medi Butler Off

Retirada rápida y sencilla de las medias, calcetines y medias de compresión médica sin necesidad de agacharse. No recomendado para mediven forte.

N.º de artículo	Descripción
6900362000	medi Butler Off



Ayudas para vestirse

Escarpín de ayuda para la colocación, una talla universal.

N.º de artículo	Descripción
6900022000	Ayudas para vestirse (unidad con 40 piezas)



Escarpín de ayuda

medi 2in1

- Las medias de compresión se deslizan sin esfuerzo por el talón
- Para prendas de todas las longitudes
- Para punteras abiertas y cerradas
- Resistente al uso y a las roturas
- Ligero y plegable, muy compacto y portátil

N.º de artículo	Descripción
6900013000	medi 2in1



Guantes de goma

- Tallas: pequeña, mediana, grande y extragrande
- Material: 100 % látex

N.º de artículo	Descripción				
6901022000	guantes de goma	S	6,5-7	1 par	
6901023000	guantes de goma	M	7,5-8	1 par	
6901024000	guantes de goma	L	8,5-9	1 par	
6901025000	guantes de goma	XL	9,5-10	1 par	
6901122000	guantes de goma	S	6,5-7	12 pares / paquete	
6901123000	guantes de goma	M	7,5-8	12 pares / paquete	
6901124000	guantes de goma	L	8,5-9	12 pares / paquete	
6901125000	guantes de goma	XL	9,5-10	12 pares / paquete	



Guantes de goma

Guantes textiles con látex medi

- Estos guantes facilitan la colocación, el ajuste y el posicionamiento de las prendas de compresión en piernas y brazos.
- Material: 40 % poliéster, 60 % nitrilo

N.º de artículo	Descripción			
6903022000	Guantes textiles medi	pequeños		1 par
6903023000	Guantes textiles medi	medianos		1 par
6903024000	Guantes textiles medi	grandes		1 par
6903122000	Guantes textiles medi	pequeños		12 pares / paquete
6903123000	Guantes textiles medi	medianos		12 pares / paquete
6903124000	Guantes textiles medi	grandes		12 pares / paquete



Guantes textiles medi

Ayudas para el tratamiento

medi fix

Artículo	Paquete	N.º de artículo
medi fix, 50 ml	6 uds.	1023025000

Loción adhesiva para prendas de compresión con borde de tejido de punto.



medi fix

* Puede consultar más información sobre los ensayos realizados en www.dermatest-garantie.de







Servicio

En las siguientes páginas encontrará toda la información necesaria para los pedidos. «medi. I feel better». Este lema se refleja en nuestros servicios, además de en la excepcional calidad de nuestros productos: el 95 por ciento de los pedidos se envía en menos de tres días laborables.

Usos previstos

Uso previsto de las medias de compresión médica de tejido circular:

Medias de compresión de tejido circular que se emplean para la compresión de las extremidades inferiores, principalmente para el tratamiento de trastornos del sistema venoso.

Uso previsto de medi Butler (pierna):

Ayuda para la colocación de medias y calcetines de compresión médica/clínica.

Uso previsto de medi Butler (brazo):

Ayuda para la colocación de mangas de compresión médica/clínica.

Uso previsto de mediven ulcer kit:

Sistema de medias de compresión de tejido circular que se emplean para la compresión de las extremidades inferiores, principalmente para el tratamiento de trastornos del sistema venoso.

Uso previsto de medi travel:

Medias de compresión de tejido circular para la profilaxis de la trombosis física en las extremidades inferiores en viajeros con venas sanas.

Uso previsto de circaid juxtalite:

El sistema de compresión se ha diseñado para proporcionar compresión en la pierna a pacientes con trastornos linfáticos y venosos.

Uso previsto de las opciones circaid para el pie:

El sistema de compresión se ha diseñado para proporcionar compresión en el pie y el tobillo a pacientes con trastornos linfáticos y venosos.





Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com



0097096 / 03.2023